

Rengöring av blodtrycksmanschett

Rengöring av blodtrycksmanschett	
Vid synlig smuts ska blodtrycksmanschettens ytterhölje tvättas i 60° Byt blodtrycksmanschetten om ludd fastnat i kardborrebandet eller om kardborrebandet förlorat ursprungliga fästegenskaper	
Slutenvård	Blodtrycksmanschetten rengörs med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel efter varje patient
Öppenvård	Blodtrycksmanschetten rengörs med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel 1 ggr/dag. Vid skadad hud/eksem ska manschetten rengöras både före och efter blodtrycksmätning. Alternativt att alltid ha en ren blodtrycksmanschett förvarad i skåp eller låda.
Rengöring av elektronisk blodtrycksmätare med tillhörande Tricuff manschett	
Slutenvård	Maskin och blodtrycksmanschett rengörs med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel efter varje patient
Öppenvård	Maskin och blodtrycksmanschett rengörs med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel 1 ggr/dag. Vid skadad hud/eksem ska blodtrycksmanschetten rengöras både före och efter blodtrycksmätning. Ren blodtrycksmanschett kan med fördel förvaras i skåp och tas fram vid skadad hud/eksem.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, var vänlig meddela faktaägare.