

## Instruktion för omhändertagandet av instrument/gods som skall steriliseras på Steriltekniskheten.

Personal på avdelning som lastar och frisläpper medicintekniska produkter (instr./gods) från diskdesinfektor ska ha utbildning och reell kompetens.

Instrument/gods som ska steriliseras skall vara ”höggradigt rent”. Detta åstadkommes genom;

- Instrument/gods ska rengöras och desinfekteras i godkänd process i diskdesinfektor i direkt anslutning till användandet (temperaturen under desinfektionsfasen skall uppnå 90°C under 1 minut alternativt för äldre diskdesinfektorer 85°C under 1-3 minuter).
- Alla instrument som går att öppna ska vara öppna, alla instrument som går att dela ska vara delade, rörformiga instrument ska anslutas till genomspolning under processen.
- Har diskdesinfektorn ingen torkfunktion eller om instrumenten inte är torra direkt efter avslutad process ska instrumenten torkas med luddfri engångstorkduk alternativt blåsas torra med instrumentluft, annars finns risk för rostangrepp.
- Instrumenten ska efter processen kontrolleras så att de är för ögat rena innan de iordningställs och skickas till STE. Instrument som inte är rena ska rengöras och desinfekteras ytterligare en gång innan de skickas till STE. Smutsiga instrument kommer att skickas tillbaka till kund.
- Rengjorda, desinfekterade och torra instrument ska packas och förvaras i rena plastpåsar för vidare transport till STE.
- Lista för streckkodsetiketter för instrument/gods som skickas/lämnas till STE skall medfölja. Ansvar för streckkodsetiketterna stämmer överens med instrument/gods ansvarar respektive kund för.
- När kunden skickar nya instrument till STE ska dessa skrivas på etikettlistan till STE.

### Vid frågor kontakta:

Avd.chef  
Sterilteknisk enhet

Tel: 0470-58 83 06