


Träningsdockor KTC

- När ni använder övningsdocka där lungan har en separat utgång för utandningsluft kan den användas till flera personer utan att spritas emellan under förutsättning att pocketmask används.
- Blåser man mun till mun skall dockan spritas med klorhexidinsprit mellan varje person.
- Om hantering av pocketmask ingår i utbildningen skall en mask per deltagare tillhandahållas.
- Efter kurs ska masker och ansikte rengöras enligt KTC s riktlinjer sedan tidigare.

Nedan ser du de dockor som har separat utgång för utandningsluft.
Resusci Anne helkropp samt Resusci Anne halvkropp.

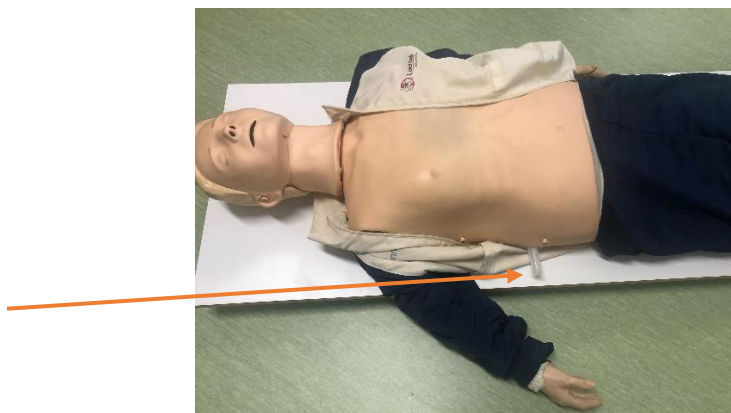

Little Anne /QCPR dockan som i första hand skall användas till HLR testet har en enklare lunga som byts efter avslutat träningstillfälle. Träna inblåsningar mun till mun eller med pocketmask och bröstkompressioner och utvärdera kvaliteten via läsplatta.



De dockor vi använder till mer avancerad träning, Essentialdockan, Carl-Gustav,



RA-simulatordockan (Resusci Anne simulator) Victoria samt Prins Daniel skall vi inte använda pocketmask på utan de dockorna ventileras alltid med andningsballong pga den känsliga tekniken i dessa dockor.



Barn dockor

Little babydockan har en enkel lunga som skall bytas efter varje träningstillfälle. Använd en docka per deltagare. Träna både mun till mun samt med pocketmask.



Juniordockan har en lunga som skall bytas efter varje träningstillfälle. Använd 1 docka per deltagare. Träna både mun till mun samt med pocketmask.



Mega code kid är för avancerad Barn-HLR. Skall ventileras med andningsballong pga tekniken i dockan.

