


PICO kan användas med eller utan sårfillnadsmaterial.



En fullständig bedömning av såret rekommenderas innan man överväger om det är lämpligt att använda sårfillnadsmaterial eller om man ska applicera PICO förbandet direkt på såret. Följ alltid tillverkarens IFU som bifogas i förpackningen.

Om sårets djup är **mindre än 0.5cm** kan PICO förbandet appliceras direkt på såret utan sårfillnadsmaterial.

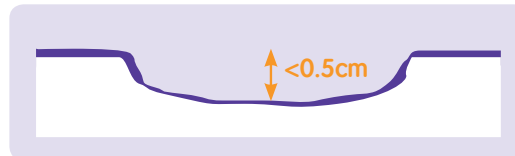


Om såret har ett djup på **0.5-2cm**, kan du överväga att använda sårfillnadsmaterial om:

- Såret är oregelbundet
- Det är en underminering
- Det är en sårhåla

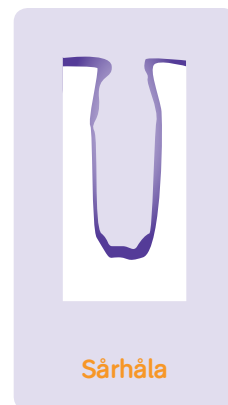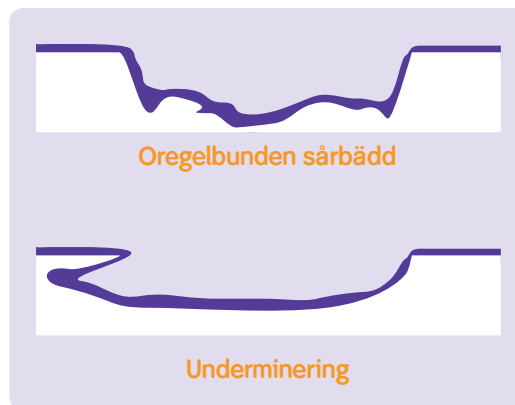

PICO fyllnadsmaterial

Som sårfillnadsmaterial finns både gasväv och skum som kan användas tillsammans med PICO, där detta är kliniskt lämpligt - till exempel på ett oregelbundet sår för att säkerställa att undertrycket når alla ytor i sårhålan.

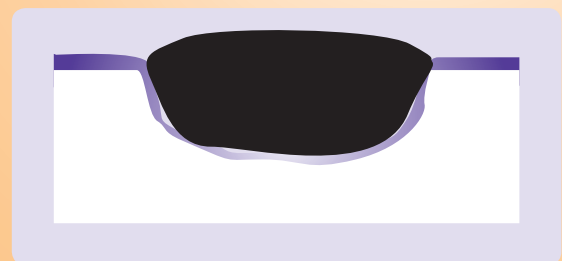

Applicering av fyllnadsmaterial

Gasväven bör fylla hela sårhålan. Undvik att överlappa gasväven.





Gasväv



Skum

Klipp till skummet för att anpassa form och storlek till såret.
 Klipp inte skummet direkt över såret.
 Se till att skummet inte överlappar den omgivna huden.

| Bild | Produkt | Artikelnr | Storlek | Förpacknings- antal |
|---|---------|-----------|---------------|--|
|  | Gasväv | 66801020 | 15cm x 17cm | 5 stk (varje enhet, individuellt packad) |
|  | Skum | 66801021 | 10cm x 12.5cm | 5 stk (varje enhet, individuellt packad) |