

## Instruktion för omhändertagandet av instrument/gods som skall steriliseras på Sterilteknisk enhet (STE)

Personal på avdelning som lastar och frisläpper medicintekniska produkter (instr./gods) från diskdesinfektor ska ha utbildning och reell kompetens.

Instrument/gods som ska steriliseras skall vara rengjort och desinficerat. Detta åstadkommes genom;

- Instrument/gods ska rengöras och desinfekteras i godkänd process i diskdesinfektor i direkt anslutning till användandet enligt teknisk rapport, TR-46:2014.
- Alla instrument som går att öppna ska vara öppna, alla instrument som går att dela ska vara delade, rörformiga instrument ska anslutas till genomspolning under processen.
- Har diskdesinfektorn ingen torkfunktion ska instrumenten torkas med luddfri engångstorkduk för instrument alternativt blåsas torra med instrumentluft, annars finns risk för rostangrepp.
- Instrumenten ska efter processen kontrolleras så att de är för ögat rena innan de iordningställs och skickas till STE. Orena, defekta och ej kompletta galler kommer att skickas tillbaka till kund.
- Rengjorda, desinfekterade och torra instrument ska packas och förvaras i rena plastpåsar samt i stöttålig, plomberad transportback (för kunder utanför sjukhuset) för vidare transport till STE.
- Lista för streckkodsetiketter för instrument/gods som skickas/lämnas till STE skall medfölja. Ansvar att streckkodsetiketterna stämmer överens med instrument/gods ansvarar respektive kund för.
- När kunden skickar nya instrument till STE ska dessa skrivas på etikettlistan till STE.
- Instrument som inkommer till STE kommer att genomgå rengöring, desinfektion, syning, oljning och steriliseringsprocess, detta för att kunna kvalitetssäkra STEs process och förlänga livslängden på era instrument.

- Köp instrument av kirurgisk kvalité för lång livslängd. Det är svårt att se skillnad på stålinstrument av kirurgisk- eller avdelningskvalité, vid behov rådfråga STE, Stille, Instrumenta eller Sundtorp.

Kontaktuppgifter till företag som ni kan vända er till för teknisk service, slipning och reparation av kirurgiska instrument.

Sundtorp Innovation AB	016-290 10
Stille AB	016-153 117
Instrumenta AB	031-336 51 00