



POSITIONERINGSGUIDE

CareWave positioneringskuddar
v.2020.1

Positioneringskuddar, Region Kronoberg
2020-06-15—2022-06-14



Produktens användningsområde är avsedd för positionering under dygnets 24 timmar. CareWave positioneringskuddar kan användas för personer med ingen eller mycket liten egen förmåga till lägesändringar. Korrekt användande av positioneringskuddar kan förebygga kontrakturer, deformiteter, trycksår och kontrollera spasticitet. De kan också användas för att avlasta specifika kroppsdelar vid smärtproblematik eller för att åstadkomma funktionella vilolägen och dränagelägen. Kuddarna kan användas av brukare med assymetriska kontrakturer. Kuddvar; Bielastisk polyamid beklädd med polyuretan. Fyllning; polystyren micro kulor.



Tlf: 0722 19 5969 Fax: +47 625 21 211 E-mejl: ingela@togemo.se

Innehåll

Produkt	Sida
Universalkuddar	3
Positioneringsrullar	3
Böjda kuddar	4
Trekantskuddar	4
Nackkuddar Utprovningsskit	5
S-kuddar	6
Kilkuddar	6
Specialkuddar	7
Kontaktinformation	8



UNIVERSALKUDDAR



CareWave Universalkudde kan användas i sittande, halvsittande eller liggande ställning. Kudden avlastar, skyddar brukaren i en optimal position. Kuddarna finns i flera olika storlekar och kan utifrån brukarens behov användas i rullstol, säng eller där behov föreligger.

HMC art.nr	Togemo art.nr	CareWave Universalkudde /cm	COMBI-överdrag (art.nr/HMC-nr)	Bomullsöverdrag (art.nr/HMC-nr)	Inkoöverdrag (art.nr/HMC-nr)
	NEG1636	Blå 100x40			
36881	NEG0944	Blå 70x40	NEG0944HLEN	NEG0970 / 37008	NEG0957/
36971	NEG0605	Blå 60x40	NEG0605HLEN	NEG0628 / 36986	NEG0621/
36983	NEG0943	Blå 60x30	NEG0943HLEN	NEG0969 / 37007	NEG0956/
36943	NEG0881	Grön 45x30	NEG0881HLEN	NEG0904 / 36944	NEG0894/
36972	NEG0606	Blå 40x30 (par)	NEG0606HLEN	NEG0904x2/ 36944	NEG0692/
	NEG0946	Blå 40x10			
	NEG0945	Blå 35x20			
	NEG3003	Grön tunn 40x30 (par)			
36982	NEG0942	Blå 46x22 Halvmåne	NEG0942HLEN	NEG0968/ 37006	NEG0955/

POSITIONERINGSRULLAR



Positioneringsrullar kan användas vid trycksårsprevention i samband med hälavlastning, samt understödja kontrakta knäleder i ryggliggande. I magläge över en positioneringsrulle kan huvud och bäckkontroll stimuleras. Rullarna kan också användas för att stabilisera kroppen i stående på tippbräda.

HMC art.nr	Togemo art.nr	CareWave Positioneringsrulle /cm	COMBI-överdrag (art.nr/HMC-nr)	Bomullsöverdrag (art.nr/HMC-nr)	Inkoöverdrag (art.nr/HMC-nr)
	NEG0613	Positioneringsrulle Blå 75x20			
	NEG0884	Positioneringsrulle Grön 48x17			
	NEG0614	Positioneringsrulle Blå 35x20 (par)			

BÖJDA KUDDAR



Böjda kuddar kan användas för att ge stabila vilolägen och avlastande positioner i sittande, halvsittande eller liggande ställningar. Kuddarna finns i olika utförande och former med mer eller mindre fyllnad. De tjocka C-kuddarna har mer fyllnad och lämpar sig utmärkt till positionering i sidliggande, som bendelare och som underarmstöd i sittande. De långa C-kuddarna har en mer omslutande förmåga och kan användas i rygg eller i sidoläge. Bålstödsudden ger ett bra underarmstöd vid sittande i säng. Banankudden kan användas i en mängd lika situationer i sittande och liggande positioner.

HMC art.nr	Togemo art.nr	CareWave Böjda kuddar /cm	Combi-överdrag (art.nr/HMC-nr)	Bomullsöverdrag (art.nr/HMC-nr)	Inkoöverdrag (art.nr/HMC-nr)
36974	NEG0608	Banankudde Blå 120x75x30	NEG0608HLEN	NEG0630/ 36988	NEG0623/
36981	NEG0939	C-kudde Lång Blå 110x75x40	NEG0939HLEN	NEG0965/ 37004	NEG0952/
	NEG0940	C-kudde Lång Blå 105x70x35			
36977	NEG0882	Banankudde Grön 110x55x23	NEG0882HLEN	NEG0905/ 36996	NEG0895/
36984	NEG0947	C-kudde tjock Blå 90x50x35	NEG0947HLEN	NEG0973/ 37009	NEG0960/
36985	NEG0948	C-kudde tjock Blå 70x40x25	NEG0948HLEN	NEG0974/ 37010	NEG0961/
	NEG0941	Bålstöd kudde Blå 90x70x30			

TREKANTSKUDDAR



Trekantskudden kan användas som ryggstöds kudde i sidliggande och eller som underbenskudde i halvsittande eller i ryggliggande positioner. Kudden ger möjlighet till att samla ihop benen. Passar brukare med slapp och hypoton tonus i nedre ex. Kan också användas för att reducera spasticitet genom att flexa i höft och knäleden. Äldre brukare som glider ner mot fotgaveln eller som har kontrakturer kan också vara hjälpta av denna kudde.

HMC art.nr	Togemo art.nr	CareWave Trekantskudde /cm	COMBI-överdrag (art.nr/HMC-nr)	Bomullsöverdrag (art.nr/HMC-nr)	Inkoöverdrag (art.nr/HMC-nr)
36973	NEG0607	Trekantskudde Blå 60x35x35	NEG0607HLEN	NEG0629/ 36987	NEG0622/
36980	NEG0887	Trekantskudde Grön 45x28x28	NEG0887HLEN	NEG0909/ 36999	NEG0899/

NACKKUDDAR



Nackkuddar med och utan låsfunktion är avsedda för att stabilisera huvudet i olika positioner.

Ni kankombinera de låsta nackkuddarna med den lilla Nackkudde blå med öppenfront, för att få till en stabilare position.



Nackkuddar med låsfunktion skall endast användas när brukaren är under uppsikt. Låsfunktionen kan också ersättas med kardborreband. Vid behov kan låsanordningen klippas bort.

HMC art.nr	Togemo art.nr	CareWave Nackkudde /cm	COMBI-överdrag (art.nr/HMC-nr)	Bomullsöverdrag (art.nr/HMC-nr)	Inkoöverdrag (art.nr/HMC-nr)
	NEG0612	Nackkudde Blå m/lås 42x48			
	NEG0880	Nackkudde Grön m/lås 32x40	NEG0880HLEN	NEG0903/	NEG0893/
36819	NEG0949	Nackkudde Blå 50x40x20	NEG0949HLEN	NEG0975/ 37005	NEG0962/
37002	NEG0950	Nackkudde Blå 32x32x10	NEG0950HLEN	NEG0976/ 36995	NEG0963/

UTPROVNINGSKIT

Vuxen



Barn



HMC art.nr	Togemo art.nr	CareWave kuddar	COMBI-överdrag (art.nr/HMC-nr)	Bomullsöverdrag (art.nr/HMC-nr)	Inkoöverdrag (art.nr/HMC-nr)
	UKITV-Special KB	Utprovningsskit vuxen			
	UKITB-Special KB	Utprovningsskit barn			

S-KUDDAR



S-kudden används primärt för att skapa trycksavlastande 30° sidoläge. Kuddens övre del placeras bakom brukarens nacke-rygg för att ge stabilitet. Kuddens nedre del används för bendelare. Vid positionering i framstupa sidoläge kan kuddens övre del istället placeras framför brukarens bål och dess nedre del användas som bendelare.

HMC art.nr	Togemo art.nr	CareWave S-kudde /cm	COMBI-överdrag (art.nr/HMC-nr)	Bomullsöverdrag (art.nr/HMC-nr)	Inkoöverdrag (art.nr/HMC-nr)
	NEG1030	S-kudde Extra Stor Blå 210x40			
36975	NEG0610	S-kudde Blå 170x30	NEG0610HLEN	NEG0631/ 36989	NEG0624/
36978	NEG0883	S-kudde Grön 130x25	NEG0883HLEN	NEG0906/ 36997	NEG0896/

KILKUDDAR



Kilkuddar kan användas för att reducera ödem och få ett avlastat högläge för arm eller ben. Kilkudden kan också användas som abduktionskil i sittande eller i liggande position. Den Extra stor kudden kan användas för magläge / dränageläge. Den lilla gröna kilkudden kan användas för handen postoperativt när behov av att sträcka ut fingerlederna.

HMC art.nr	Togemo art.nr	CareWave Kilkudde /cm	COMBI-överdrag (art.nr/HMC-nr)	Bomullsöverdrag (art.nr/HMC-nr)	Inkoöverdrag (art.nr/HMC-nr)
	NEG0811	Kilkudde Extra Stor Blå 95x30x45			
	NEG0615	Kilkudde Blå 30x18x20	NEG0615HLEN	NEG1052/	NEG0778/
36991	NEG0888	Kilkudde Grön 23x14x15	NEG0888HLEN	NEG0910/ 37000	NEG0900/

SPECIALKUDDAR



Stabiliseringskudden Ben är en specialkudde som är avsedd för att ge en stabil följsam position av benen i en neutral position. Hämlarna kan också avlastas med hjälp av denna kudde då dess nedre del är förhöjd. Genom att istället använda denna förhöjningsdel under knäleden, undviks en översträckning av knät.



Semi-Fowler kudden är avsedd att användas för att ge abduktion och flexion av benen i ryggliggande position. Kudden kan också användas för bål och huvudstöd i mag eller ryggliggande position. Vid Wind Swept Hips (WSH) är kudden optimal. Finns i 4 storlekar, och 2 av dessa finns i en modell med extra höj Abduktionsdel. varianter.



Fjärilskudden är avsedd för att avlasta och stödja underarmen, knäleden eller fotleden i olika specifika positioner. Dess form gör att den också kan fungera som bendelar i olika positioner. Kudden kan också hjälpa vårdgivaren att "lyfta" benet vid sårömläggning, eller för att stabilisera underarmen vid venprov- tagning i säng. Fjärilskudden underlättar också vid ADL situationer så som vid påklädning.

Avlastningskudde Öra är avsedd att användas för att avlasta, förebygga eller vid behandling av trycksår på örat. Fungerar bäst till brukare som ligger stilla med huvudet.



HMC art.nr	Togemo art.nr	CareWave Specialkuddar /cm	COMBI-överdrag (art.nr/HMC-nr)	Bomullsöverdrag (art.nr/HMC-nr)	Inkoöverdrag (art.nr/HMC-nr)
	NEG1743	Semi-Fowler XXS Grön.			
	NEG2022	Semi-Fowler m Hög abd, Grön.			
	NEG0919	Fjäril skudde Blå 40x30x10			
36993	NEG0890	Fjäril skudde Grön 30x20x8	NEG0890HLEN	NEG0911/ 37001	NEG0902/
	NEG1391	Semi-Fowler XXL Blå 88x63x15			
36976	NEG0611	Semi-Fowler Blå 70x50x12	NEG0611HLEN	NEG0632 / 36990	NEG0625/
36979	NEG0886	Semi-Fowler Grön 55x40x10	NEG0886HLEN	NEG0908 / 36998	NEG0898/
	NEG1103	Avlastningskudde Öra Blå 30x30			
	NEG2021	Semi-Fowler m HÖG abd del Blå.			



Togemo AB

Postadress

Östra Vagnatan 8
70227 ÖREBRO

Rådgivning 0722-19 59 69

E-mejl ingela@togemo.se

Order faktura frågor ; 019-25 40 40

E-mejl order post@togemo.se

Lokal produktspecialist; Annika Salminen

0722-19 59 60

annika@togemo.se



www.togemo.se

