

## Akut brist på FC-Mix-rör (rosa kork) till P-Glukos

Leverantören av FC-Mix-rör till P-Glukos har meddelat att leverans av dessa rör kan ske först om ca tre veckor.

Detta rör ersätts efterhand med BD Vacutainer glukosrör (Natriumfluorid/Kaliumoxalat) med grå kork. När FC-Mix-rören återigen finns hos leverantören kommer denna möjlighet att upphöra.

### Ersättningsrör:



### Observera:

**Provhantering ersättningsrör:** Efter provtagning blandas röret nogga. Röret skickas så att det ankommer till lab inom 24 timmar. Vid provtagning sen eftermiddag centrifugeras röret i 10 min vid 2000g i rumstemperatur. Avskilj plasma till nytt plaströr. Förvaras i kylskåp 4-8° innan transport.

Vi ber er att vara uppmärksamma på att glukosnivån kan bli något lägre vid användning av rör med Natriumfluorid/Kaliumoxalat (grå kork). Samma referensvärde gäller för båda rörtyperna.

Bortse från information om rosa korkfärg på etikett från Cambio Cosmic och Remiss kemi.

Kim Ekblom  
Överläkare  
Medicinskt ansvarig

Marie Petersson  
Laboratorieinstruktör  
Kliniska kemiska laboratoriet