




Snabbreferens-  
handbok för  
behandlingsystem

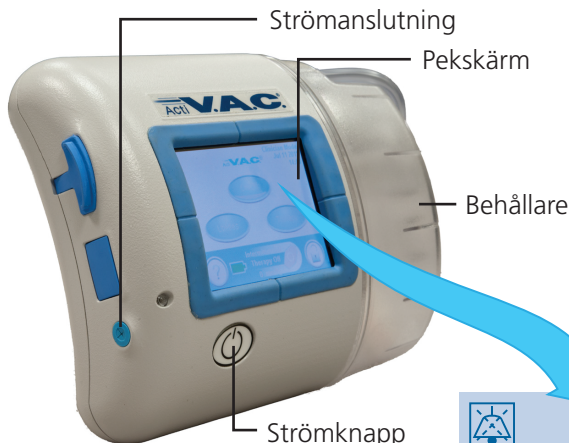

Strömknapp


Tysta ljudsignalen

Behandling **på/av**

Snurrande ikon = negativt tryck är  
aktiverat

Hjälp

Batterinivå

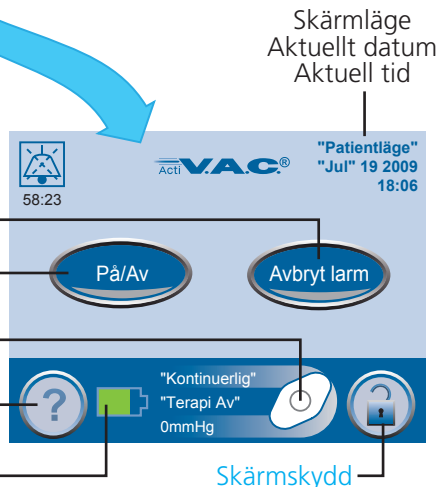

## Innan du använder ActiV.A.C.® Therapy- enheten

Läs den här  
snabbpreferenshandboken.  
Handboken ska förvaras  
i fickan på bärväskan till  
behandlingsenheten.

Läs igenom handboken  
tillsammans med din läkare  
eller sjuksköterska.

**Läs  
säkerhetsinformationen  
tillsammans med  
din läkare eller  
sjuksköterska. Det här  
informationsbladet  
finns också i fickan  
på bärväskan till  
behandlingsenheten.**

Vanliga frågor om  
ActiV.A.C.® Therapy-enheten  
finns i användarhandboken.

**Om en nödsituation skulle  
uppträffa kontaktar du din  
läkare eller ringer det  
lokala nödnumret.**

## Starta V.A.C.® Therapy



Håll strömknappen  
intryckt i ca två  
sekunder om du  
vill slå på eller stänga av  
behandlingsenheten



Tryck för att starta eller  
avsluta behandlingen

Grön = på, grå = av

## Borttagning av behållaren



Tryck ned frikopplaren till  
behållarens spärr

Dra behållaren rakt ut från  
behandlingsenheten

## Installation av behållaren



Skjut behållaren över styrtappen till  
behållarens spärr.

Vrid eller vänd inte på behållaren.

Tryck fast behållaren ordentligt på  
behandlingsenheten tills ett klickljud hörs.

## Varningar och larm

Mer information finns i  
användarhandboken.



KCI USA, Inc.  
San Antonio, TX 78219 USA  
1-800-275-4524  
www.kci1.com



KCI Medical Products (UK), Ltd.  
Wimborne, Dorset  
BH21 7SH  
United Kingdom  
www.kci-medical.com

Alla varumärken som anges här tillhör KCI Licensing,  
Inc., dess dotterbolag och/eller licensgivare. ©2012 KCI  
Licensing, Inc. Med ensamrätt. 340091-08 Rev C 9/2012