

Omläggning med Pico 14

Förpackningar kan beställas med pump som även innehåller 2 förband eller förpackning som endast innehåller förband.

Tänk på:

- att pumpen håller i **14 dagar**.
Beställ därför även förpackning med bara förband.
- Appliceringsguide finns i förpackningen.
- Välj förband efter sårets storlek.
- Välj med fördel så stort förband som får plats då undertrycksbehandlingen även har effekt i vävnaden runtomkring, behandlar så kallade microödem.

Pico 14



Förbered omläggning på vanligt sätt



Rengör såret, skydda sårets kanter och omgivande hud, där du ska häfta, med barriärfilm



Utför omläggning på vanligt sätt. Här behövs antiseptika.
Acticoat silvertamponad, specialförband för PICO



Fäst PICO-förbandet med slangen uppåt, så långt från såret som möjligt.


- Förbandets sårkontaktlager är av silicon
- Ett superabsorberande lager och luft-lås-lager
- Film med hög genomsläpplighet av vattenånga
- Vatten och bakterität barriär utifrån



Tryck och fäst häftkanten noga
Ett förband 15 x 20 cm hanterar 300 ml vätska



Remsor med extra häfta finns i förpackningen. Ta bort det ena skyddspappret märkt 1.

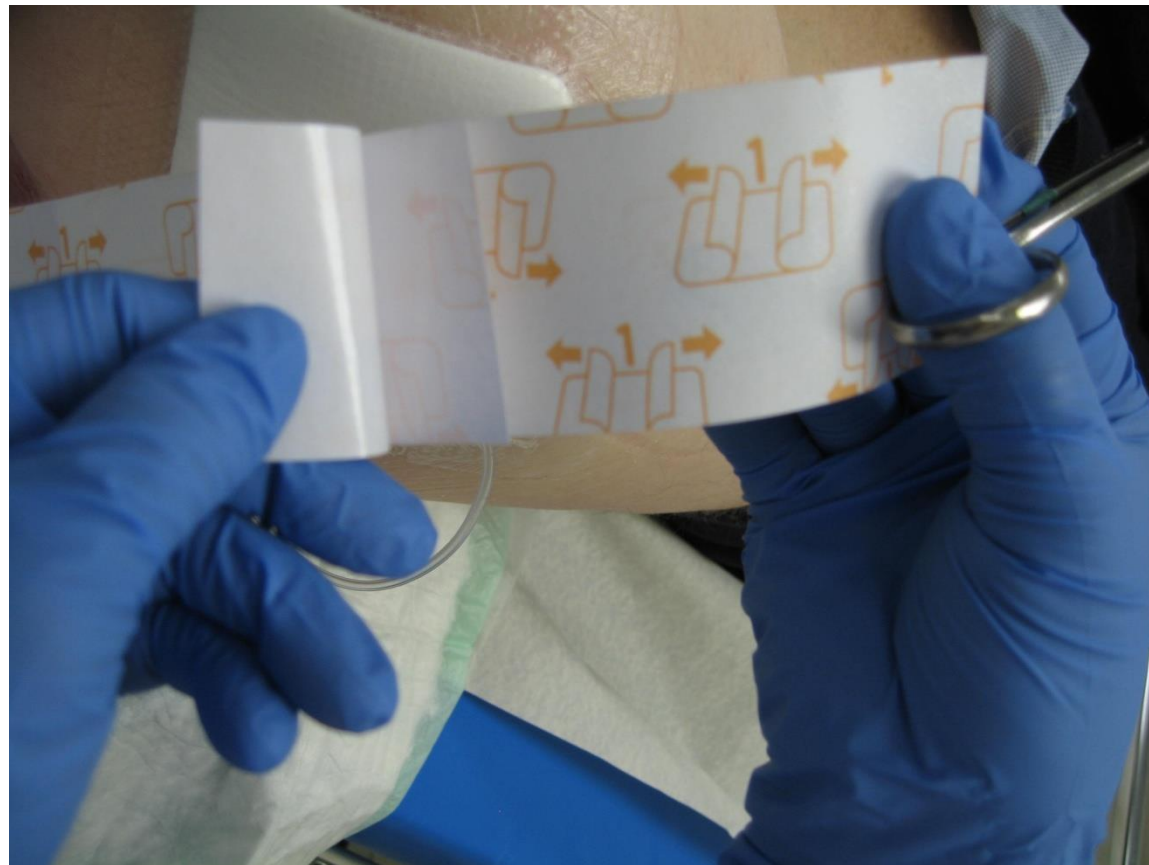

Tryck till i kanten och lyft upp den vita fliken och dra.
Skydd nr 2 följer då lätt med.



Två stycken AA-batteri följer med förpackningen. Sätt dem i pumpen och stäng luckan.

- Koppla samman slang från pump med slang från förband och tryck på den orangea knappen.
- Vänta omkring 45 SEK medan pumpen jobbar upp ett tryck.
- Grön lampa lyser när pumpen skapat ett undertryck.
- Gå igenom varningslamporna med patienten.
- Patienten kan själv kolla så att alla kopplingar är fastskruvade eller att ingen slang är knickad vid larm.



Om förbandet blir helt mättat av sårvätska syns det på förbandet utifrån och lampa på pumpen lyser.

- Rekommenderad omläggning 1-2ggr per vecka.
- När behandlingsveckorna är slut släng batterierna sedvanligt och pumpen som plastförpackning.
- https://www.smith-nephew.com/global/assets/pdf/products/wound/pico_sheet_se.pdf (Kopiera adressen och klistra in på google - Pico snabbguide.)

