

## Rengöring av innerkanyl

Innekanylen rengörs 2 gånger/dag samt vid behov.  
Rengöring görs under vattenyta i kärl/burk för att minska risken för stänk.

Rengör innerkanylen invändigt och utvändigt med kranvatten < 45<sup>0</sup> C och oparfymerat handdiskmedel.

Vid vattentemperatur > 45<sup>0</sup> C koagulerar protein vilket försvårar rengöring.

- Rengöring görs under vattenyta i kärl/burk
- Använd rena non-woven kompresser in och utvändigt, dra kompresser genom innerkanylen med hjälp av böjd peang eller pincett
- Till små innerkanyler används rengöringstork då kanylerna är för smala för att dra igenom kompresser
- Upprepa tills allt synligt slem avlägsnats
- Skölj kanylen under rinnande vatten
- Renskölj innerkanylens in och utsida med sterilt vatten eller torka sidorna helt torra med ren non-woven kompress
- Förvara torkad innerkanylen torrt och dammfritt i en id-märkt burk tills nästa användningstillfälle. En blöt innerkanyl, efter sköljning med sterilt vatten, förvaras med burkloppet delvis öppet så att den torkar



## Rengöring av använt flergångs kärl/burk

Rengör använt kärl/burk efter varje användningstillfälle i diskdesinfektor då detta finns, annars rengör manuellt.

Vid manuell rengöring använd:

- Borste, oparfymerat handdiskmedel och vatten < 45<sup>0</sup> C
- Skölj under rinnande vatten.
- Torka torrt
- Desinfektera kärl/burk med alkoholbaserat medel
- Låt lufttorka