

MONTERINGSANVISNING

Kanylburk modell SP



Kanylburken levereras med ett löst lock.



Placera locket ovanpå behållaren.



Tryck ihop med båda händerna tills det hörs ett "klick"



Det runda locket är vridbart för tillfällig stängning.



För slutlig stängning – Vrid det runda locket till stängt läge tills det hörs ett "klick".



Tryck ner den gula plattan tills det hörs ett "klick". Kontrollera att det inte går att vrida det runda locket.

Av säkerhetsskäl skall burken ej fyllas mer än till fyllnadslinjen, se etikett.

För mer information kontakta vår kundservice.

Telefon 0200 – 21 05 00

E-post:
kundservice.miljo@stenarecycling.se

MEDICLEAN
OPTIMAL

www.stenarecycling.se