

Blodgassprutor

Vi har just nu två olika typer av blodgassprutor upphandlade.

- Blodgasspruta med blandningskula
- Blodgasspruta utan blandningskula

Båda sprutorna finns med och utan förmonterad kanyl

Blodgasspruta med blandningskula

För analys på Klinisk kemi och IVA används företrädesvis blodgassprutan med blandningskula. På instrument, ABL 825 FLEX, finns en blandningsenhet där provet blandas automatiskt när spruta med blandningskula används. Detta medför säkrare analysresultat och att analysen B-Hemoglobin (B-Hb) kan besvaras.

Blodgasspruta utan blandningskula

För patientnära analys på instrumentet iSTAT så kan båda typerna av spruta användas.

Benämning	Best nr	Foto	Minsta blodmängd
Blodgasspruta 1,5 ml med kanyl och blandningskula (<i>SafePICO</i>)	32393		0,7 mL
Blodgasspruta 1,5 ml utan kanyl med blandningskula (<i>SafePICO Aspirators</i>)	31208		0,7 mL
Spruta blodgas 3 mL med kanyl och stickskydd	18176		0,8 mL
Spruta blodgas 3 mL utan kanyl	12089		0,8 mL
Spruta blodgas 1 mL utan kanyl	12090		0,3 mL

Katarina Skov-Poulsen
Laboratorieinstruktör

Maria Berggren Söderlund
Överläkare