

Arbetsrutin för förebyggande- och behandlande madrasser samt andra hjälpmedel

Alla madrasser finns på avtal med leverantör Care of Sweden. Ingen av madrasserna bekostas centralt. Kostnaden för madrasserna läggs på avdelningens egen budget. Kompetenskort i kompetensportalen finns för samtliga behandlande madrasser.

Förebyggande madrass



Optimal 5 zon

Vi har sedan 20210102 avtal på en standardmadrass från Care of Sweden. Madrassen heter Optimal 5 zon. Madrassen är både förebyggande och behandlande upp till trycksår **kategori 1 och 2**. Brukarvikt 0 -150 kg och garantitid på madrasskärna och överdrag är 3 år. Madrassen är uppbyggd av två madrasser. En hel i botten och en skuren överst. Överdraget har handtag och evakueringsremmar i fickor på långsidan. Handtag finns också på kortsidan.



Madrassen kan dras över till röntgenbord utan att det blir störningar i bilden

Märkning på madrassen talar bland annat om tillverkningsdatum



Skötsel Vid rengöring efter varje patient måste överdraget öppnas i dragkedjan. Om kroppsvätska har läckt igenom och ner i madrasskärnan måste madrass och överdrag kasseras. Samma skötselråd gäller alla madrasser. Gällande behandlande madrasser torkas pump och slangar med ytdesinfektion.

Rengöring Överdraget kan rengöras med ytdesinfektion, klorinduk eller väteperoxidduk. Det kan tvättas i maskin i 60 grader.

Behandlande madrasser

Behandlande madrasser finns antingen med fast luft eller växeltryck med pump.

Curocell Aera Zon

Den fasta luftmadrassen är Curocell Area Zon från Care of Sweden. Den är förebyggande och behandlande till Trycksår **kategori 1, 2 och 3**.

Brukarvikt 0 -230 kg. Garantitid 3 år. Den ska alltid kombineras med evakueringslakan som beställs separat från samma företag. Madrassen ger störningar på röntgen och måste märkas tydligt så det inte blir missförstånd.



Curocell A4

Curocell A4 är en växeltrycksmadrass som jobbar med pulsationer istället för regelrätt luftväxling mellan luftcellerna. Växlingen mellan luftcellerna blir mer som en pulsation då luften fördelas på ett annat sätt än tidigare och madrassen upplevs som behagligare att ligga i för patienterna. Madrassen är behandlande upp till trycksår **kategori 4**.

Brukarvikt 30 – 180 kg, garantitid 3 år. Även denna madrass ger störningar på röntgen.



Curocell A4 CX10 är en bäddmadrass som kombineras med en tunnare madrass i botten. Ska precis som Curocell AERA ZON kombineras med evakueringslakan.



Curocell A4 CX 20 är en ersättningsmadrass som fästs i sängbotten. Ger störningar på röntgen. Kan användas tillsammans med räddningsmadrass vid begränsad utrymningsväg.

Brandskydd

Utrymning av sängliggande patienter ska i första hand ske i säng, varje avdelning måste se till att utrymningsvägar är fria och möjliggör detta. Om utrymningsvägar är blockerade måste evakuering ske på madrass. Val av madrass styrs av avdelningens egen möjlighet till evakuering. Om en avdelning har två horisontella utrymningsvägar ökar möjligheten att evakuera i säng, jämfört med de avdelningar som är begränsade med endast en horisontell utrymningsväg. Specialmadrasser som är fästa i sängbotten och således inte fungerar ihop med räddningslakan kan en så kallad räddningsmadrass köpas in till avdelningen.

Avdelningschef (som har ansvaret), skyddsombud och trycksårsombud får tillsammans välja typ av madrass och utifrån val utforma en utrymningsrutin som ska vara känd och inövad på avdelningen.

I samband med verksamheternas madrassinventering behöver antalet behandlande madrasser dokumenteras.

Övriga hjälpmedel (finns ej på avtal)

Ett mycket känsligt ställe och vanligt att trycksår snabbt uppkommer är hälar. Genomför Risk- och hudbedömning direkt vid ankomst och avlasta med **Multikudde**. Multikudde ska användas med överdrag (på bilden syns kudden utan överdrag). Multikudde ska kombineras med Slider för att undvika skjuv på hälarna vid uppresning av ryggstödet. **Kilkudde** till höger används som stöd vid lägesändring åt sidan 30°.



Sittdynor

Förebyggande sittdyna Relax Dougel från företaget Salubrious. Dynans unika konstruktion ger mycket hög tryckavlastning. Komfort, tryckavlastning och stabilitet uppnår man genom att brukaren kommer ner i dynan. Motverkar skjuvning och friktion genom att brukaren sitter ner i dynan. Enkel genom att enbart placera i rullstolen, aldrig masseras. Rekommenderad brukarvikt max 130 kg och med 2 års garanti.



Behandlande sittdyna RoHo finns på Arbetsterapierna att låna. De ska provas ut individuellt. Ska användas förebyggande vid risk för sittersår och behandlande vid trycksår på sittbensknölar.



Övrig hälavlastning

En annan typ av hälavlastning är Lassekudde. En skumkudde där hälen är helt avlastad. Måste kläs i överdrag. Kontrollera att överdraget inte är spänt där hälen ska sjunka ner



Molly hälavlastning, fästs runt ankeln. För att inte orsaka översträckning i knät, lägg en kudde under knäna.

