


Mepilex Border Sacrum Appliceringsguide


180620

145857


MILJÖÄRKT Trycksak ltr nr 341 249, Zetterqvist Tryckeri AB

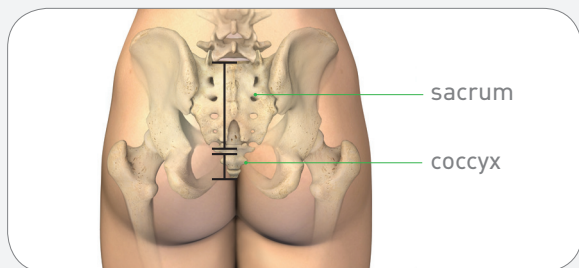


1. Område att skydda. Bedöm patientens anatomi och utvärdera om förbandet skall placeras enligt figur A eller B baserat på täckning och/eller eventuella problem med inkontinens.

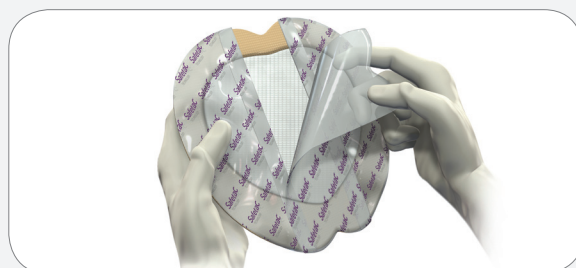


2. Säkerställ att huden är helt torr och fri från krämer och salvor etc. Ta bort den mittersta skyddsfilm. Användning av hudskyddsbarriär under förbandet är inte nödvändigt.

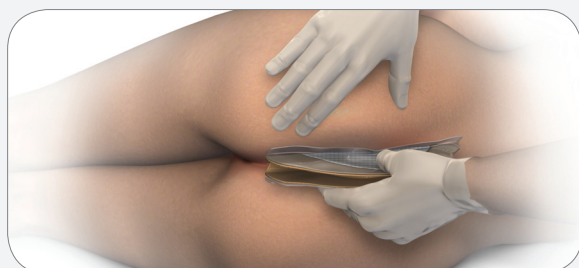


3. Håll isär skinkorna med hjälp av assistans från en kollega. Applicera förbandet på sakrala området och på övre delen av stjärtskåran. Applicera närmast anus först.

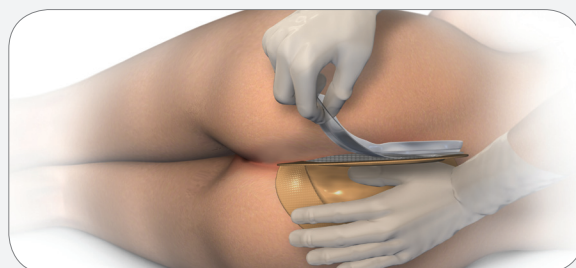

4. Stryk sidan av handen längs stjärtskåran nerifrån och upp för att säkerställa placering. Slåta försiktigt ut varje sida på plats.

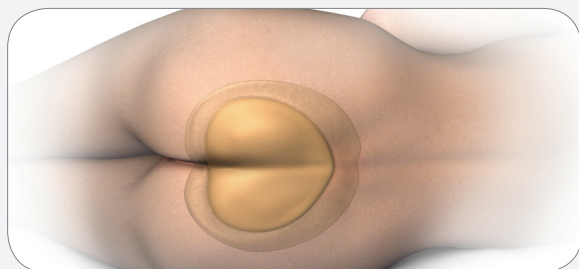

Figur A - Placering av förband.

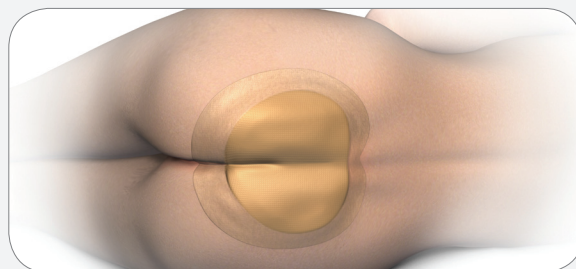

Figur B - Omvänd placering av förband.

Prevention vid kategori 1

- Daglig inspektion under förbandet.
- Dra förbandet bak, utvärdera och återapplicera. Se till att kanten av förbandet är slätt utan rynkor.
- Dokumentera och utvärdera.
- Ta bort och byt förband efter 3 dagar.
- Byt ut om patienten fortfarande är i riskzonen.



SKJUV



TRYCK



MIKROKLIMAT



FRIKTION

Trycksår kategori 2 och över

- Behandla som ett sår.
- Dokumentera och utvärdera.

Mepilex® Border Sacrum

SafetaC
TECHNOLOGY

18 x 18cm - Art. nr. 282000
23 x 23cm - Art. nr. 282400



Referenser:

C. Tod Brindle, BSN, RN, ET, CWOCN, CLIN IV; Virginia Commonwealth University Health System, Richmond, VA. Case study on: Use of an Absorbent Soft Silicone Self-Adherent Bordered Foam Dressing to Decrease Sacral Pressure Ulcers in the Surgical Trauma ICU. Poster designed by Theresa Winston, Nurse Practitioner, Wound Care and Stomal Therapy, Fraser Coast Health.

The symbol and the word mark are both registered trademarks or trademark pendings of Mölnlycke Health Care.
©2012 Mölnlycke Health Care. All rights reserved. www.molnlycke.com
Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg. Tel. 031-722 30 00.