

# Tryckavlastande madrasser och andra hjälpmedel



Britt-Louise Andersson Samordnare

2018-01-02

## Avtal på ny tryckavlastande madrass för prevention och upp till och med sårkategori 2.




**Vi har sedan 2017-02-01 avtal på en ny sjukhusmadrass från Care of Sweden. Madrassen heter Optimal 5 zon.**

**En förebyggande och behandlande madrass av trycksår kategori 1 och 2.**

**Brukarvikt 0 -150 kg**

Garantitid på madrasskärna och överdrag är 3 år.

Madrassen är uppbyggd av två madrasser. En hel i botten och en skuren överst. Överdraget har handtag och evakueringsremmar i fickor på långsidan. Handtag finns också på kortsidan.

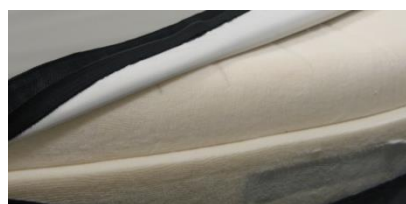

Madrassen kan dras över till röntgenbord utan att det blir störningar i bilden

**Märkning** på madrassen talar bland annat om tillverkningsdatum



**Skötsel** Vid rengöring efter varje patient måste överdraget öppnas i dragkedjan. Om kroppsvätska har läckt igenom och ner i madrasskärnan måste madrass och överdrag kasseras.

**Rengöring** Överdraget kan rengöras med ytdesinfektion, klorinduk eller väteperoxidduk. Det kan tvättas i maskin i 60 grader.

## ”Garantimadrasser”

Under sommaren 2016 byttes ett stort antal madrasser ut där madrasskärnan var nerlegad. 150 madrasser byttes inom garantitiden. De vi fick i ersättning är märkta på följande sätt. På dessa ersättningsmadrasser är garantin förbrukad enligt gällande upphandlingsregler. Företaget är Ranson



Vid nyinköp 2016 från samma leverantör, fick vi istället köpa en madrass med hel kärna . Den ser ut så här. Båda madrasserna är förebyggande.



## Följande hjälpmedel finns men inte på avtal

**Behandlande madrasser** finns med fast luft och luftväxlande med pump.

Den fasta luftmadrassen är **Curocell Area Zon**. Care of Sweden Den är förebyggande och behandlande till **Trycksår kategori 1, 2 och 3**.

**Brukarvikt 0 -230 kg**. Den ska alltid kombineras med evakueringslakan som beställs separat från samma företag.

Madrassen ger störningar på röntgen och måste märkas tydligt så det inte blir missförstånd.



Om patienten har **trycksår kategori 4** behövs en luftväxlande madrass. **Curocell 4** är den som ska användas då. Luftväxlande madrasser och hur de ska skötas läser du mer om i TILDA. Brukarvikt 30 – 180 kg



## Andra hjälpmedel för att undvika trycksår. Finns inte på avtal.

Ett mycket känsligt ställe och vanligt att trycksår snabbt uppkommer är hälar. Risk och hudbedöm direkt vid ankomst och avlasta med Multikudde. Multikudde ska användas med överdrag (på bilden syns kudden utan överdrag). Multikudde ska kombineras med Slider för att undvika skjuv på hälarna vid uppresning av ryggstödet. Kilkudde till höger används som stöd vid lägesändring åt sidan 30°.



## Sittdynor

Förebyggande sittdyna Consil från företaget Helab




**Behandlande sittdyna RoHo finns på Arbetsterapierna att låna.** De ska provas ut individuellt. Ska användas förebyggande vid risk för sittersår och behandlande vid sittersår.





En annan typ av hälavlastning är Lassekudde. En skumkudde där hälen är helt avlastad. Måste kläs i överdrag. Kontrollera att överdraget inte är spänt där hälen ska sjunka ner

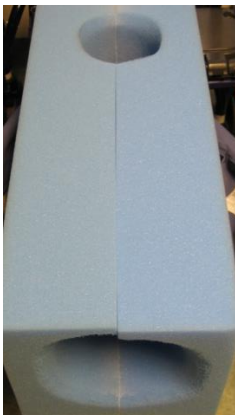

Molly hälavlastning, fästs runt ankeln. För att inte orsaka översträckning i knät, lägg en kudde under knäna.

