

Ta venös blodgas på rätt sätt

Det förekommer att venös blodgas tas i Li-heparinrör med mörkgrön kork. För att få bra kvalitet på analysresultaten för venösa blodgaser, ska provet tas i **blodgasspruta** med tillsats av balanserat Li-Heparin. Vid provtagning med Li-heparinrör finns det luft i röret efter avslutad provtagning som påverkar blodgasanalyserna. Hållbarheten i provrör är endast 15 minuter medan hållbarheten i spruta är 30 minuter.

From 2025-10-01 kommer endast venös blodgas tagen i spruta att godkännas.

Nedan spruta rekommenderas i första hand.



Radiometer Safe Pico, 1,5 ml med blandningskula (minsta provvolym **0,7 ml**). Beställs i Raindance med artikelnummer 32393.

Kim Ekblom
Överläkare
Medicinskt ansvarig

Jessica Marklund
Områdesansvarig
Biomedicinsk analytiker