

Ny blodgasspruta

Nuvarande blodgasspruta *safePICO* Aspirator 1,5 ml utan kanyl (sesamnr 31208) ersätts med *safePICO* A 1,0 ml utan kanyl. Nytt sesamnr: 957-204.



Denna spruta har ett kolvstopp vid 1,0 ml vilket förhindrar överfyllning av sprutan. Minsta fyllnadsvolym är 0,7 mL. Observera att kolven måste tryckas in i botten **innan** användning för att ta bort överflödigt luft. Se bild 3 i Quick guide på sida 2.

Quick guide



Hur man använder en *safePICO* aspirator blodgasspruta



1. Se till att använda handskar.



2. Ta bort den ventilerade *safeTIPCAP*en.



3. Tryck försiktigt på kolven för att få ut överflödigt luft.



4. Ta blodgasprovet och aspirera tills det tar stopp.



5. Placera och vrid den ventilerade *safeTIPCAP*en.



6. Inspektera visuellt förekomst av luftbubblor.



7. Knacka försiktigt för att få bort eventuella luftbubblor



8. Håll sprutan vertikalt och tryck kolven försiktigt uppåt tills all luft pressats ut och det blir motstånd, för att få ut eventuella luftbubblor.

safeTIPCAP ska fyllas med blod.



9. Blanda provet genom att vända sprutan flera gånger.

To learn more, please scan this QR code



10. Analysera provet omedelbart.
Ta inte bort den ventilerade *safeTIPCAP*en när du använder Radiometers blodgasinstrument.

Sandra Larsson
Laboratorieinstruktör

Marie Petersson
PNA-ansvarig