



Kronobergs sortiment av kognitions hjälpmedel

ISO KOD 042718, 222712, 222715, 222716, 241303

Hjälpmiddelscentralen
2022-03-23

I detta dokument finner du information om hjälpmedel som ingår i Kronobergs sortiment. Använd alltid Hjälpmedelshandboken anvisningar för att se när respektive hjälpmedel är förskrivningsbart och vem som har förskrivningsrätt.
www.regionkronoberg.se/vardgivare/vardriktlinjer/hjalpmedel/

Innehållsförteckning

Hjälpmiddel för stimulering av sinnen och känslighet 042718	3
Att tänka på inför förskrivning av tyngdväst	3
Tyngdväst vuxna	3
Modell: Kedjeväst	3
Tyngdväst barn	3
Modell: Kedjeväst	3
Bolldyna barn	4
Modell: Bolldyna	4
Ur och klockor 222712	5
Påminnelsestöd	5
Modell: Malem klocka mellan	5
Modell: Fickur Larma talande	5
Modell: MEMOmessenger	5
Visuell tidsnedräkning/timer	6
Modell: MEMO Timer (f.d. Timstock)	6
Modell Timstock (äldre sortiment)	6
Modell: Time Timer Plus	6
Modell: Time Timer Armbandsur (vuxen)	7
Modell: Time Timer MOD	7
Ökad tidsförståelse	7
Modell: My Time	7
Modell: MEMO Dayboard	8
Modell: MEMODayplanner 3 (äldre sortiment)	8
Almanackor, kalendrar och planeringssystem 222715	9
Planering	9
Modell: Pia-kalender	9
Modell: Stor Alma	9
Modell: Symbolix Planeringskalender	9
Elektronisk kalender	10
Modell: MEMODay	10
Programvara förenklad kalenderfunktion till smartphone/surfplatta	10
Modell: Handikalender	11
Modell: Handi 5 SW	11
Programvara förenklad kalenderfunktion med hårdvara	12
Modell: Handi One (äldre sortiment)	13
Hjälpmiddel för minnesstöd 222716	14
Doseringsask/medicinpåminnare	14
Modell: Careousel Advance	14
Påminnelsestöd	14
Modell: C.STATUS	14

Miljöstyrsystem 241303	15
IR-system fjärrkontroll	15
Modell: Fjärrkontroll Gewa Maxi.....	15
Modell: Andromeda Socket, reläbox.....	15
Omgivningskontroll med olika antal knappar	15
Utlåningsväskor	16

Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet 042718

Att tänka på inför förskrivning av tyngdväst

- I samband med förskrivning är det av stor vikt att en utprovning görs med möjlighet att prova olika storlekar av västar.
- Det finns möjlighet att ha utprovning på hjälpmedelscentralen eller att låna väska fyra. På hjälpmedelscentralen finns hela sortimentet för utprovning. För att boka lokal och/eller väska, ring kundtjänst, 0470-58 86 60.
- Checklistan ”Inför förskrivning av tyngdväst” ska användas, checklistan finns på vårdgivarwebben.
- Behov av tyngdväst utanför sortiment hanteras via enskilt ärende.

Tyngdväst vuxna

Modell: Kedjeväst

Kedjevästen är ett hjälpmedel som gör det lättare att koncentrera och fokusera i aktivitet. Genom det tryck som västen utövar på kroppen får användaren en känsla av lugn och trygghet.

Egenavgift: 350 kronor från och med den dag personen fyller 20.

Leverantör: Abilia, www.abilia.se

WebSesam artikelnummer:

x-small – väst 2,0kg, tyngdkrage 2,3kg, totalvikt 4,3 kg	35527
small – väst 2,5kg, tyngdkrage 2,3kg, totalvikt 4,8 kg	33796
medium – väst 3 kg, tyngdkrage 2,3kg, totalvikt 5,3 kg	33797
large – väst 3,5kg, tyngdkrage 2,3kg, totalvikt 5,8 kg	33798
x-large – väst 4,5kg, tyngdkrage 2,3kg, totalvikt 6,8 kg	34683



Tyngdväst barn

Modell: Kedjeväst

Kedjevästen gör det lättare att koncentrera och fokusera i aktivitet. Genom det tryck som västen utövar på kroppen får användaren en känsla av lugn och trygghet.

Leverantör: Abilia, www.abilia.se

WebSesam artikelnummer:

110/122 – väst 1kg, tyngdkrage 1,35kg, totalvikt 2,35 kg	34680
128/140 – väst 1,5kg, tyngdkrage 1,35kg, totalvikt 2,85 kg	34681
146/158 – väst 2kg, tyngdkrage 1,35kg, totalvikt 3,35 kg	34682

Bolldyna barn

Modell: Bolldyna

Bolldynan läggs på vanliga stolar med hård sits och knyts fast. Bolldyna med mindre bollar ger mindre stimuli och upplevs mjukare, (snabbare tillvänjning).

På hjälpmedelscentralen finns bolldynor att prova.

Leverantör: Kom i kapp, www.komikapp.se

WebSesam artikelnummer:

30x 35, 25 mm bollar 33063

30x 35, 38mm bollar 33631

40x 40, 25 mm bollar, fyrfacksindelning för att bollarna inte ska lägga sig på varandra
33062



Ur och klockor 222712

Påminnelsestöd

Modell: Malem klocka mellan

Klockan ger påminnelse om dagliga aktiviteter. Tolv påminnelser kan ställas in med vibration. Batteriet varar i cirka 1,5 år (med två påminnelsealarm). Efter batteribyte sparas gjorda inställningar automatiskt.

Egenavgift: 350 kronor från och med den dag personen fyller 20.

Leverantör: Picomed, www.picomed.se

WebSesam artikelnummer: 35237



Modell: Fickur Larma talande

Med Fickur Larma talande går det att ställa in maximalt tio dagliga larm. Då klockan larmar hörs tre larmsignaler samt uppläsning av tiden. Efter tio sekunder larmar klockan igen om larmet inte stängts av manuellt efter första larmpåminnelsen. Valbart vibrationslarm finns. Det går också att när som helst höra aktuell tid som då sägs analogt, det vill säga: "Klockan är fem i nio, fredag morgon".

Notera att den inte automatiskt ställer om vid sommar-/vintertid.

Egenavgift: 350 kronor från och med den dag personen fyller 20.

Leverantör: Iris hjälpmedel, www.irishjalpmedel.se

WebSesam artikelnummer: 30759



Modell: MEMOmessenger

MEMOmessenger är en talande klocka med egna inspelade påminnelser. Den består av en basenhet, Memo Base, och en bärbar enhet, Memo Go. Klockan på Memo Base display visar och talar om veckodag, tid på dygnet (till exempel morgon och förmiddag), klockslag, datum, månad samt år. Läs in personliga påminnelser i klockan, som larmar och påminnelsen spelas upp vid önskad tid.

Den bärbara enheten kan bäras med och då fungerar klockan samt att den ger påminnelser. Memo Go har även en inspelningsfunktion för upp till tio röstinspelningar.

Egenavgift: 350 kronor från och med den dag personen fyller 20.

Leverantör: Abilia, www.abilia.se

WebSesam artikelnummer: 29398



Visuell tidsnedräkning/timer

Hjälpmiddel för att underlätta förståelsen av det abstrakta tidsbegreppet. Användaren kan få stöd i hur länge en aktivitet ska pågå eller när aktiviteten senast ska påbörjas.

Modell: MEMO Timer (f.d. Timstock)

Nedräkningen av tid visualiseras lodrätt med en lysdiodsrad som slocknar allt eftersom tiden går. För att indikera att den valda tiden gått ut blinkar hela raden kombinerat med ljud och vibration. I de användaren inte vill störa omgivningen kan larmet fås med enbart vibration. MEMO Timer klarar användning i våtutrymme. Kort- och lång halsrem medföljer förpackningen.

Leverantör: Abilia, Abilia

WebSesam artikelnummer:

8 min, 16 lysdioder	32928
20 min 20 lysdioder	24030
60 min 20 lysdioder	24029



har fall

Modell Timstock (äldre sortiment)

Finns Timstock i lager på hjälpmedelscentralen så levereras den första hand. Tiden visualiseras vågrätt och är avsedd att använda inomhus i torra utrymmen. Kan med skyddsväska användas i till exempel våtutrymmen. Artikelnummer är det samma som för MEMO Timer.

Tillbehör: Skyddsväska med flytkudde och bälteshake

WebSesam artikelnummer: 31237

Modell: Time Timer Plus

Klocka med både visuell och auditiv funktion. Ett rött fält visar hur mycket tid som är kvar, maximalt 60 min. När det röda tidsintervallet är slut ger klockan ifrån sig en kort ringsignal. Klockan har en on/off-knapp för ringsignals funktionen.

Leverantör: KomiKapp, www.komikapp.se

WebSesam artikelnummer: 33128



Modell: Time Timer Armbandsur (vuxen)

Användaren ges möjlighet att veta "hur mycket tid är kvar" och/eller att "tiden är slut" utan att kunna klockan. Time Timer armbandsur har tre olika lägen: Digital klocka, analog timer och larm. Man kan ställa ett larm åt gången (original 0 – 60 minuter och eget val upp till 99 timmar). Armbandsuret är fukttåligt men ej avsedd för bad eller dusch. Passar för handleder mellan 14–21 cm i omkrets.



Leverantör: KomiKapp, www.komikapp.se

WebSesam artikelnummer: 33128

Modell: Time Timer MOD

Time Timer MOD, 9 x 9 cm med gråsvart skyddshölje visualiserar tid med hjälp av en röd skiva som minskar i storlek allt eftersom tiden passerar. Time Timer MOD ställs enkelt in genom att dra tidsplattan till önskad tid. Den startar direkt och avger en ljudsignal när tiden är slut. Maximal tid är 60 minuter.



Leverantör: Frölunda Data www.frolundadata.se

WebSesam artikelnummer: 34625

Ökad tidsförståelse

Modell: My Time

Genom att trycka på knappen får användaren uppläst vad klockan är. Ljudvolymen går att justera och tidsangivelsen är valbar mellan analog eller digital tid.

- Analog: "Klockan är halv tre fredag eftermiddag".
- Digital: "Klockan är femton och trettio".

My Time har magnetiskt bakstycke som möjliggör att fästa på exempelvis kylskåpet eller en whiteboardtavla. Uttag finns för hörlur eller halsslinga. Går att koppla till en extern kontakt.

Egenavgift: 350 kronor från och med den dag personen fyller 20.

Leverantör: Iris hjälpmedel, [Iris hjälpmedel](http://Iris.hjalpmedel)

WebSesam artikelnummer: 35275



Modell: MEMO Dayboard

Planeringstavla som visar tiden med hjälp av ljuspelare. Tiden visas konkret med en lysdiod/ljusprick som slocknar för varje kvart.

Dagens tidspelare visas på tavlans vänstra sida med röda lysdioder och natten visas på höger sida med blå lysdioder. Lysdiodernas styrka kan regleras och helt stängas av om användaren inte vill ha ljus på natten. Digital tid visas i tavlans nedre del. Dagen kan börja tidigare eller senare via magnetband som sätts över originalsiffrorna. Då kan man välja att dagen till exempel börjar klockan sex istället för vid sju.

Whiteboardtavlan är magnetisk och kan anpassas med text, symboler och bilder.

Möjlighet finns att ställa larm, en för varje lysdiod och kvart. Larmen ger en pulserande pipsignal under 15 sekunder och/eller en blinkande lysdiod vid den aktuella tidpunkten.

Bilder finns att skriva ut på Abilias hemsida via Abilia print it som är en webbtjänst för utskrift av bilder.

Mått: 71,3x39,2x3,2 cm Vikt: cirka fyra kg.

Memo Dayboard finns med 24-timmarsvisning. Önskas tolvtimmarsvisning beställs särskilt magnetband, se tillbehör.

Egenavgift: 350 kronor från och med den dag personen fyller 20.

Leverantör: Abilia, www.abilia.se

WebSesam artikelnummer: 37363 dygnet visas kl 1-24

Tillbehör: Magnetband med tolvtimmarsvisning, **WebSesam artikelnummer:** 34023
Magnetband med 24-timmarsvisning **WebSesam artikelnummer:** 34022



Modell: MEMODayplanner 3 (äldre sortiment)

Denna modell har utgått hos leverantör, men finns den i lager på hjälpmedelscentralen är det denna produkt som levereras. Skillnaden är att i Memo Dayboard är inställningsläget från en sidopanel (tavlan behöver inte plockas ner). MEMODayplanner 3 sitter inställningsknapparna på baksidan och måste därför plockas ned vid justeringar.

WebSesam artikelnummer: 33616

Tillbehör: Samma som till MEMO Dayboard

Almanackor, kalendrar och planeringssystem 222715

Planering

Modell: Pia-kalender

Pedagogisk Informativ Almanacka i A5-format. Det finns plats både för att skriva och för att använda bilder. Veckodagarna är färgkodade som är vedertagna i Sverige. Datum och månader är borttagna vilket gör almanackan går att börja användas när som helst under året. Dag och datum fylls i av användare, närstående eller förskrivare.



text

att

Leverantör: Habiliteringen i Malmö stad

WebSesam Artikelnummer: 32424

Modell: Stor Alma

Stor Alma är en vägghängd årskalmanacka. Den visar månadens alla dagar på varje uppslag. Alla dagar är färgkodade som är vedertagna i Sverige. Datum och månader är borttagna vilket gör att almanackan gör att börja användas när som helst under året. Etiketter med månadsbilder, datum och siffror medföljer för anpassning. Formatet är liggande A2 (60 x 42 cm).



Leverantör: Trollreda, www.trollreda.se

WebSesam artikelnummer: 23612

Modell: Symbolix Planeringskalender

Planeringstavla för att ge struktur och veckoöversikt. Tavlan hängs på väggen och upphängningstillbehör och skyltar på veckodagar medföljer. Då tavlan är magnetisk går det att placera bilder/textkort via magnet och det går även att skriva med whiteboardpenna. Symbolix finns i vitt eller med färgkodade veckodagar.

OBS! Innan förskrivning av planeringstavla kan bli aktuell, provas i första hand enklare varianter i öppna handeln av användaren själv. Krävs anpassande insatser av förskrivaren för att nå självständighet kan Symbolix förskrivas.

Leverantör: KomiKapp AB, www.komikapp.se

WebSesam artikelnummer: Veckoschema med färgade dagar 60 x 67 cm 29387, veckoschema vit 60 x 67cm 29123 och endagstavla 18 x 60 cm 32909



Elektronisk kalender

Modell: MEMODay

MEMODay är en elektronisk tidskalender med display som går att anpassa. På displayen kan tid, veckodag, datum och vilken del av dygnet det är visas (morgon, förmiddag, eftermiddag, kväll eller natt). Du kan välja analog eller digital klocka. Möjlighet finns till talsyntes. Möjlighet att anpassa bakgrunden till svart text mot vit botten eller vit text mot svart botten. Kan ställas in på många olika språk.



Egenavgift: 350 kronor från och med den dag personen fyller 20.

Leverantör: Abilia, www.abilia.se

WebSesam artikelnummer: 34939

Programvara förenklad kalenderfunktion till smartphone/surfplatta

- Innan förskrivning ska utprovning av programmet ske. Vid behov av konsulentstöd läggs arbetsorder via Websesam, samtidigt fylls blanketten ”Kartläggning av förmågor och behov inför konsultation kring kalender i mobiltelefon” i. Blanketten finns på vårdgivarwebben. Den ligger till grund för hjälpmedelsbehovet. Skickas till konsulent på hjälpmedelscentralen.
Kognitionsrummet där alla program finns bokas via Kundtjänst, 0470-58 86 60.
- Använd anpassningsschema som stöd vid utprovning. Finns i pärm placerad i kognitionsrummet ”Blanketter för stöd vid utprovning”. Blanketten lämnas sedan till tekniker inför installation.
- Förskriv artikeln och gör en arbetsorder i Websesam för montering och anpassning vid val av åtgärd. Ange i arbetsordern att det gäller installation och även om ytterligare stöd vid inträning önskas.

- Möjlighet finns att ladda ner en demoversion och testa Handi 5sw eller Handikalendern via Abilias hemsida.
- Tre år efter att licensen har köpts eller förlängts behöver den förnyas för att fria uppdateringar ska erhållas. Några månader innan licensen behöver förnyas kontaktar tekniker berörd förskrivare om aktuell användare. Förskrivare gör då bedömning om licens ska förnyas eller lämnas tillbaka. Aktuell information till tekniker via arbetsorder i WebSesam.

Modell: Handikalender

Handikalendern är ett tids- och planeringshjälpmedel till iOs och Android. Applikationerna är avsedda för användare som är i behov av ett avancerat tidsstöd i en lättanvänd kalender. Programvaran innehåller kalender och till aktiviteter går det att koppla funktioner som till exempel checklista, anteckningar och röstanteckning.


Aktiviteterna går att färgkoda och visuellt stöd i form kvartursprincipen kan väljas för att se hur lång tid det är kvar till en aktivitet eller hur länge en aktivitet ska pågå. Funktionerna är desamma i iOs och Android med undantag att i Android går det även att få vibration som larmtyp och en larmvy som täcker hela skärmen.

Till Handikalendern kan en Webbkalender via My Abilia kopplas. Med Webbkalendern kan man hantera sin kalender från en dator eller annan Smartphone. Här kan också stödperson/stödpersoner logga in och lägga in aktiviteter men också se om larmen är bekräftade eller ej.

OBS! Vid installation behöver användaren sina uppgifter för att kunna ladda ner appar och en e-postadress för att aktivera Webbkalendern. Användaren behöver kunna komma åt sin e-post (eller den e-post man väljer att koppla webbkalendern till) vid installationstillfället.

Leverantör: Abilia, www.abilia.se

WebSesam artikelnummer: 33739

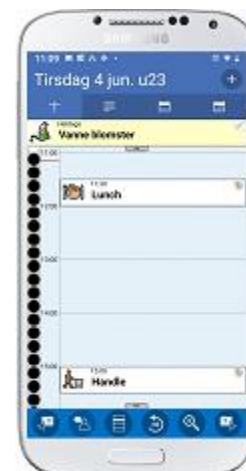

Modell: Handi 5 SW

Handi 5 SW är en programvara med Handifunktioner för installation i egen Android/Smartphone eller surfplatta. Denna modell väljs istället för Handikalendern om användaren behöver ytterligare funktioner än kalendern (se nedan) och/eller anpassad startskärm.

I programvaran ingår även en förenklad SMS-funktion med bild- och talstöd. Det finns även möjlighet att skapa basmeddelande som gör det enkelt att skicka SMS.

Via kris-SMS kan en kartlänk med aktuell position skickas till vald person som får information var användaren befinner sig.

Till Handi5 SW kopplas en Webbkalender via My Abilia, som är en webbtjänst för användare som nyttjar Handi 5 SW. Med Webbkalender kan man hantera sin kalender från en dator och få bättre överblick. Här kan också en stödperson logga in och lägga in aktiviteter men också se om larmen är bekräftade eller ej.

Funktioner i Handi 5 SW:

- **Album** - Bildspel med bilder, text och eget inspelat ljud – till exempel en semesterresa.
- **Anteckningar** - Skriva in information med det alfabetiska tangentbordet och sedan få uppläst.
- **Bildsamtal** - En-fyra bilder läggs upp som en samtalsremsa med valbart ljud med talsyntes eller inspelat tal.
- **Checklista** - Avbockningsbara listor, till exempel inköpslistor som kan vara textbaserade eller bildbaserade alternativt en blandning av text och bild.
- **Formulär** - Olika typer av individuella formulär kan skapas. Till exempel självskattningsfrågor om symtom och dagsform etcetera.
- **Kalender** - Inlagda aktiviteter visas med ett tydligt gränssnitt. Kalenderfunktionen är anpassningsbar utifrån användarens behov. Flera olika inställningsmöjligheter för larm vid en aktivitets början och slut. Möjligheten att koppla kvartur till inlagd aktivitet finns. Aktiviteterna symboliseras med text och/eller bilder samt talstöd och kan färgkodas.
- **Kontakter** - Kontaktuppgifter som kan läggas in tillsammans med foto.
- **Krisplan** - Skapa åtgärdsplaner för ökad trygghet när oväntade situationer uppstår, till exempel missar bussen.
- **Miniräknare** - Med inställningsmöjligheter.
- **Prisräknaren** - Avsedd att ge visuellt stöd vid användarens inköp. Användaren skriver in priset på de varor som handlas och summan visas. Man får sedan visuellt förslag på lämpliga valörer. Eventuella pengar användaren får tillbaka visas också visuellt i valörer och siffror.
- **Röstanteckningar** - Enkel diktafon.



Vår rekommendation är att börja med högst tre funktioner.

OBS! Användaren behöver kunna komma åt sin e-post (eller den e-post man väljer att koppla webbkalendern till) vid installationstillfället.

Leverantör: Abilia, www.abilia.se

WebSesam artikelnummer: 33080

Programvara förenklad kalenderfunktion med hårdvara

- Före förskrivning skall utprovning ske. Vid behov av konsulentstöd läggs arbetsorder i Websesam. Kognitionsrummet där alla program finns bokas via kundtjänst 0470-58 86 60.

- Använd anpassningsschema som stöd vid utprovning. Finns i pärmen ”Blanketter för stöd vid utprovning”. Blanketten lämnas sedan till tekniker inför installation.
- Förskriv artikeln och gör en arbetsorder i WebSesam för montering och anpassning. Ange i arbetsordern om ytterligare stöd vid inträning önskas.
- Vår rekommendation är att starta med max tre funktioner för att därefter, vid behov lägga till fler.

Modell: Handi One G2

Handi One G2 är en handdator (ingen telefonfunktion) med programvaran Handi 5 SW. Läs ovan om dess funktioner.

Vid leverans medföljer skyddsfodral.

Om tidigare modell Handi One (utgått hos leverantör) finns på hjälpmedelscentralens lager levereras denna. Det som skiljer de båda modellerna åt är hårdvaran.

Egenavgift: 350 kronor från och med den dag personen fyller 20.

Leverantör: Abilia, www.abilia.se

WebSesam artikelnummer: 36898



Modell: Handi One (äldre sortiment)

Modellen har utgått hos leverantör.

Egenavgift: 350 kronor från och med den dag personen fyller 20.

Leverantör: Abilia, www.abilia.se

WebSesam artikelnummer: 35337

Hjälpmedel för minnesstöd 222716

Doseringsask/medicinpåminnare

Modell: Careousel Advance

Careousel Advance är en automatisk medicindoserare som påminner via ljudsignal och/eller blinkande ljus när det är dags att ta sin medicin. Den matar fram rätt dos vid rätt tillfälle samtidigt som övrig medicin inte är tillgänglig. Medicinen tas genom att Careousel vänds upp och ned och medicinen hålls ut i handen. Vändningen gör att larmet tystnar. Medicinen doseras i en kassett med 28 fack.

Transparant plastlock kan förskrivas som tillbehör. Skifte av lock görs i samband med beställd teknikeraktivitet för larmprogrammering.

Slår automatisk över till sommar- och vintertid.

Leverantör: Posifon, www.posifon.se

WebSesam artikelnummer: 32555

Tillbehör: Medicinkassett med lock artikelnummer 32748

Transparant lock artikelnummer. 37972



Påminnelsestöd

Modell: C.STATUS

C-status är ett påminnelsestöd för användare som har behov av ökad trygghet i hemmet som behöver stöd att komma ihåg saker som annars orsakar stark oro. Låste jag dörren? Drog jag ur strykjärnet? Är fönstret stängt?

Sensorer monteras på dörr och/eller fönster samt en valbar elprodukt. Varje sensor skickar aktuell status till panelen där all kommunikation sker trådlöst.


I grundpaketet ingår:

- Panel som presenterar med text och/eller bild vad som är på och av, öppet eller stängt.
- Nyckelbricka som visar status när du lämnade bostaden.
- Sladdsensor kopplas till valbar elprodukt.
- Dörr- eller fönstersensor som visar om dörr eller fönster är öppen eller stängd.
- Låsswitch om dörren är låst eller upplåst.

Är valbar elprodukt spis krävs bostadsanpassningsbidrag för ansökan om spisvakt.

Om andra funktioner önskas eller dubblering av någon av ovanstående funktioner behövs, hanteras som enskilt ärende.

Leverantör: Sensagon, www.sensagon.se **Sesam artikelnummer:** 3382

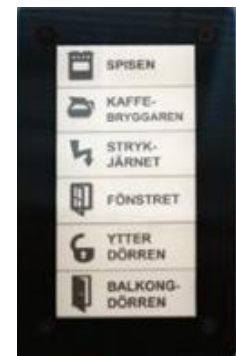

IR-system fjärrkontroll

Modell: Fjärrkontroll Gewa Maxi

En stor och tydlig fjärrkontroll med 16 nedsänkta fält som kräver liten tryckkraft. Används främst som fjärrkontroll till TV, men fungerar även till andra apparater som styrs med IR-signaler. Bekräftelse i form av ljud, ljus och vibration ger återkoppling på ett knapptryck. Fälten kan märkas upp med bilder eller text. Individuellt anpassade överlägg gör tekniker på Hjälpmedelscentralen, som också gör installationen efter bedömning av förskrivare.



OBS! Flera digitalboxar använder idag annan teknik än IR, vilket lättast testas genom att gå till ett annat rum och byta kanal. Fungerar detta så är det inte IR. I vissa fall kan vi kringgå detta och ändå kunna programmera fjärrkontrollen. Om du vid behovsbedömningen märker att TV:n inte styrs av IR uppger du vilken TV-modell det är i arbetsordern till tekniker.

Leverantör: Abilia, www.abilia.se

WebSesam artikelnummer: 36647

Modell: Andromeda Socket, reläbox

Anslut den lampa, elvisp etcetera. som du önskar styra till reläboxen Andromeda socket. Med kontakter eller någon slags fjärrkontroll/omgivningskontroll kan du sedan tända/släcka lampor och sätta på/av olika apparater.



Det finns två sätt att programmera Andromeda på:

- Strömmen växlar mellan på och av. Till exempel tända en lampa genom att trycka på omgivningskontrollen/manöverkontakten och släcka genom tryck på samma kontakt.
- Strömmen är på så länge som manöverkontakten eller knappen på omgivningskontroll är nedtryckt.

Leverantör: Abilia, www.abilia.se

WebSesam artikelnummer: 35382

Omgivningskontroll med olika antal knappar

En sändare kan användas för att öppna entrédörrar, passage- och garagedörrar, för hissar, lägenhetsdörr, låsöppning, porttelefon, belysning, telefon, radio och TV, larm etcetera. Omgivningskontroller finns med allt från en knapp till 18.

Att tänka på inför en förskrivning:

- hur många knappar behövs
- hur många nivåer

- ska omgivningskontrollen tydliggöras med bilder/symboler för de olika knapparna
- behövs skanning

Kontakta hjälpmedelskonsulent för val av omgivningskontroll.



Utlåningsväskor

Utlåningsväskorna är tänkta för visningar och studiebesök samt i de fall det inte går att personen kommer till hjälpmedelscentralen. Lånet kan maximalt vara en vecka då det är fasta transportdagar till andra orter inom länet om du inte kan hämta själv. Väskorna skall vara tillbaka på hjälpmedelscentralen senast 16.00 dag sju. Väskorna hämtas och lämnas i kundtjänst. Vid lån av väska ett och tre tar man med sig hela väskan, oavsett hur många hjälpmedel man behöver vid utprovningstillfället.

Väskorna bokas i Cosmic var för sig eller via Kundtjänst 0470 -58 86 60.

Tekniker inventerar och går igenom väska ett och tre regelbundet. Saknas eller om något är trasigt meddela gärna tekniker inom kognition eller kundtjänst.

Hygienaspekter

Tyngdvästarna får inte lämnas kvar hemma hos patient.

Vid visning/utprovning rengör både förskrivare och användare händerna före- och efter besöket med handsprit. Handsprit finns i väskan.

Väska ett innehåller:

Careousel Advance komplett samt genomsynligt plastlock

Handi One

Larma 10

Malem klocka mellan

MEMODay

MEMOmessenger

My Time
Pia-kalender

Time timer

Memo Timer (f.d. Timstock) 20- och 60 minuter

Timstock (äldre sortiment) 20- och 60 minuter

Stor och enkel fjärrkontroll

Väska tre ”Planeringstavlor” innehåller:

Symbolix, veckoöversikt

Symbolix, endagsöversikt

StorAlma

MEMODayplanner 24 timmarsvisning

Magnetremsa 12-timmarsvisning

Väska fyra ”Tyngdvästar” innehåller:

Kedjeväst 128/140, junior

Kedjeväst Medium, vuxen

Kedjeväst Large, vuxen