

Basförråd förbands- och kompressionsprodukter sjukhusavdelningar 240101-280101

Innehåll

Innehåll	4
Rengöring	4
Utbildning	4
Barriärfilm	5
Hudskyddsapplikator Esenta	5
Cavilon 3M Continence care wipes	5
Hudskyddsapplikator Cavilon Advanced	5
Kommentar;	5
Biofilmsreducerande	6
Prontosan sårspollösning	6
Prontosan woundgel	6
Förband, Alginat*	6
Kaltostat	6
Förband, gelbildande	7
Aquacel Extra och Aquacel band	7
Förband, polyreutan	8
Tegaderm foam adhesive	8
Mepilex Border Flex Lite och Mepilex Border Flex	8
Mepilex Up	8
Mepilex transfer	8
Mepilex lite	9
Mepilex border sacrum	9
Hälförband	9
Förband, Silver	10
Aquacel Ag+Extra och Aquacel Ag+band	10
Förband, superabsorbent	11
Kliniderm superabsorbent	11
Cutimed Sorbion	11
Superabsorbent för helt underben	11
Cutimed Sorbion Sachet XL 45 x 25cm	11

DryMax Soft 37x56cm	11
Förbandet läggs med marginal utanför sårkanten, är följsamt och tillräckligt stort för att täcka både fot och underben, och kan användas under kompression.	11
Förband, svamp och bakteriebindande	12
Sorbact compress och Sorbact Ribbon Gauze	12
Sorbact Gel Dressing	12
Förband, upprensande	13
Polymem Max och Wic	13
Häftborttagning	13
Salts Adhesive Remover Wipes	13
Remove servett	13
Sårrengöring	14
Ringcurette	14
Debrisoft Duo.....	14
Debrisoft Lolly.....	14
Filmförband	14
3M Tegaderm HP	14
Tegaderm Sårfilm	15
Opsite Flexifix	15
Filmförband med absorption	15
Mepitel film	15
Tejp	15
Suturtejp	15
Tubbandage.....	16
Tubbandage Danafast DS.....	16
Kompression	16
Coban 2 och Coban 2 lite	16

Innehåll


Avtalade förbands- och kompressionsprodukter från 2024-02-01-2028-01-31 med fokus på produkter som bör finnas på varje sjukhusavdelning. Förbanden är indelade i grupper utifrån deras funktion. Flera av förbanden finns i fler storlekar än vad som finns presenterat. Rubriker med * betyder att det är specifika avdelningar som använder dessa produkter.

Rengöring

För att minska bakteriebördan i ett sår och skapa förutsättning för sårhäkning är rengöring det viktigaste. Vid omläggningen bör tiden rengöring stå för mer än hälften av tiden. Ett sår kan rengöras på olika sätt; mekaniskt med sax och pincett och/eller sårslöv och monofilamentsvamp eller med autolys. Vid mekanisk rengöring används färsktappat ljummet kranvatten, låt rinna 1 minut. Vid steril omläggning används de nödvändiga sterila lösningarna.

Utbildning

På RiksSårs hemsida (www.rikssar.se) finns en kostnadsfri utbildning för personal som träffar och behandlar patienter med svårhäkta sår. För personal som jobbar i Region Kronoberg finns även ett kompetenskort i kompetensportalen som heter Sår och sårbehandling.

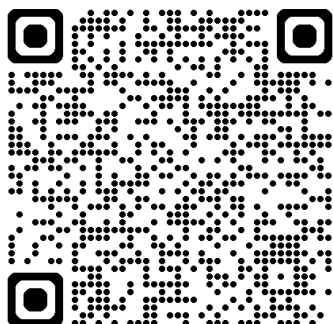

Barriärfilm

Hudskyddsapplikator Esenta

Skapar en andningsbas barriär på huden och skyddar upp till 72h. Minskar risken för hudskador och irritation från kroppsvätskor.

Storlek; 1ml och 3ml pinnar.

Leverantör; ConvaTec



Cavilon 3M Continence care wipes

Barriär - Cavilon barriärtvättservetter för inkontinensvård innehåller 3 % dimetikon, som ger en effektiv barriär mot fukt och kroppsvätskor förknippade med inkontinens.

Storlek; 20x25cm

Leverantör; 3M



Hudskyddsapplikator Cavilon Advanced

Den skyddande beläggningen skapar en miljö som avvisar retande ämnen och stöder läkning och komfort. Tillhandahåller en effektiv barriär, som har visat sig reducera smärtan vid behandling av IAD.

Storlek; 2,7ml

Leverantör; 3M



Kommentar;

Det finns även barriärkräm och skyddsfilm i sprayform samt barriärtvättlappar.

Biofilmsreducerande

Prontosan sårspollösning

För omslag i 15 minuter. Har en mycket god rengörande verkan och går igenom bakteriernas biofilm. Biofilm= skyddar bakterier från antiseptika, antibiotika och kroppens egen uppremsande förmåga så kallad autolys.

Volym 250ml har 8 veckors hållbarhet i öppnad förpackning.

Engångsampull 40 ml

Prontosan woundgel 50 g

Gelen har 8 veckors hållbarhet, öppnad förpackning. Kan kombineras med olika typer förband och ger en uppremsande och fuktig sårmiljö.

Leverantör; B. Braun Medical



https://www.bbraun.se/sv_se/produkter-och-behandlingar/sarлакning/prontosanskolan.html

Förband, Alginat*

Kaltostat

Gelbildande natrium-kalciumalginat för måttligt till kraftigt vätskande sår. Har visat sig ha viss hemostatisk effekt på lätt blödande sår. **Används främst på kirurgavdelning.**



Leverantör; ConvaTec

Förband, gelbildande

Aquacel Extra och Aquacel band

Hydrofiberförband med förstärkande fibertrådar, gelbildande och högabsorberande.

Placera Aquacel Extra direkt i sårhåla eller på såret och lämna en marginal på minst 1 cm utanför sårkanten. Täck med lämpligt fuktbevarande ytterförband. Finns i olika storlekar.

Leverantör; ConvaTec



Förband, polyreutan

Tegaderm foam adhesive

Polyuretanskum med häftkant. Hög absorptions och avdunstningsförmåga. Patenterad stjärnliknande utformning gör att den passar på svårapplicerade ställen ex. över leder.

Finns format som små förband till fingrar och tår "blomman eller flygplanet"

Leverantör; 3M



Mepilex Border Flex Lite och Mepilex Border Flex

Polyreutanskum förband med Safetac (silikonyta) som gör den vidhäftande. Finns i olika storlekar med olika absorptionsmängd. Symbol formad som en droppe indikerar hur stor absorptionsförmåga förbandet har.

Leverantör; Mölnlycke



Mepilex Up

Används vid måttligt till rikligt vätskande sår med tjockflytande exsudat. Förbandet har större porer som möjliggör effektiv absorption och vertikal transport av sårvätska.



Mepilex transfer

Mjukt förband med Safetac (silikon) för vätskande sår. Transporterar effektivt bort vätska från såret och minskar risken för maceration. I kombination med ett lämpligt ytterförband upprätthålls en fuktig sårmiljö.

Leverantör; Mölnlycke



Mepilex lite

Tunt polyuretanskum för lätt vätskande sår. Tunn design som gör det mjukt och formbart.

Leverantör; Mölnlycke



Mepilex border sacrum

Specialformat för sacrala sår. Kan användas förebyggande mot trycksår och om huden är oskadad kan förbandet reappliceras efter inspektion under 3 dygn. Därefter ska förbandet bytas.

Leverantör; Mölnlycke



Hälförband

Det finns flera olika hälförband med silikonyta, med borderkant och ett utan vidhäftning. Detta kan vissa avdelningar ha nytta v.

Leverantörer; Mölnlycke,



Förband, Silver

Aquacel Ag+Extra och Aquacel Ag+band

Bakteriedödande och biofilmsnedbrytande förband med förstärkande fibrer.

Högabsorberande. Bildar en mjuk fuktighetsbevarande gel som binder in sårvätska och bakterier. Effekt upp till 7 dagar.

Primärförband på måttligt till kraftigt vätskande infekterade sår eller vid ökad risk för infektion.

Lägg med minst 2 cm utanför sårkant och täck med fuktbevarande sekundärförband

Leverantör; ConvaTec



Förband, superabsorbent

Kliniderm superabsorbent

Superabsorberande förband för kraftigt vätskande sår. Vertikal absorbtion-ytan förblir torr. Förbandet bör gå 2,5 cm utanför sårkant och läggas direkt mot sårytan. Kan användas under kompression. Finns i flera storlekar.

Leverantör; Mediq



Cutimed Sorbion

Superabsorbent med annorlunda form för att underlätta fixering. Finns även med slits till dränageslangar eller katetrar.

Leverantör; Essity



Superabsorbent för helt underben

Cutimed Sorbion Sachet XL 45 x 25cm

Superabsorberande förband för kraftigt vätskande sår. Binder effektivt exsudat och skyddar omgivande hud mot maceration. Förbandet ska läggas med marginal utanför sårkanten, har en följsam form som passar bra runt exempelvis ankeln och kan användas under kompression.



DryMax Soft 37x56cm

Mjukt och högabsorberande förband för vätskande sår. Binder exsudat och skyddar omgivande hud mot maceration.

Förbandet läggs med marginal utanför sårkanten, är följsamt och tillräckligt stort för att täcka både fot och underben, och kan användas under kompression.

Förband, svamp och bakteriebindande

Sorbact compress och Sorbact Ribbon Gauze

Bakterie och svampbindande förband av hydrofob (vattenavvisande väv). Viktigt att Sorbact har direktkontakt med sårytan. Feta produkter som salva och kräm kan inte kombineras med Sorbact eftersom de binder sig till väven och försämrar effekten.


Leverantör; Abigo



Sorbact Gel Dressing

Bakterie- och svampbindande sårkontaktlager i acetatväv kombinerat med vattenbaserad gel. Kan användas både till rena och kontaminerade eller infekterade sår.

Leverantör; Abigo

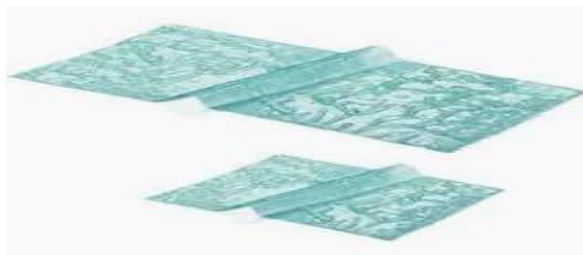

Förband, upprensande

Polymem Max och Wic

Multifunktionellt förband. Upprensning med hjälp av Surfactant F68 som aktiveras av fukt. Glycerin i förbandet drar upp exsudat med näringsämnen och tillväxtfaktorer från djupare vävnad till såret. Överflödig vätska absorberas i förbandet. Reducerar smärta och inflammation. Förebygger biofilm.

Cavitet: Fyll 2/3 av såret med Polymem WIC. Täck med Polymem MAX minst 1 cm utanför sårkanten. Använd aldrig gel eller alginat mellan förband och sår. Finns med borderkant.

Leverantör; PartnerMed



Häftborttagning

Salts Adhesive Remover Wipes

Häftborttagning, våtservetter

Leverantör; M Care



Remove servett

Leverantör; Smith and Nephew



Sårrengöring

Ringcurette

Använd bedövning före användning. Vass på ena sidan. Upphöjning på curetten visar den vassa änden. Upphöjningen ska vara riktad uppåt vid rengöring. Finns i olika storlekar. Bra storlekar är 4mm och 5mm

Leverantör; Observe Medical



Debrisoft Duo

Används för mekanisk rengöring av sår med beläggningar, fibrin, nekros eller biofilm. Produkten fuktas före användning och appliceras med lätt tryck i sårbädden för att avlägsna föroreningar och förbättra sårmiljön. Debrisoft Duo är avsedd för engångsbruk och ska kasseras efter användning.



Debrisoft Lolly

Används för mekanisk rengöring av sårbädd, sårkanter och omkringliggande hud vid beläggningar, fibrin, nekros eller biofilm. Produkten fuktas före användning och möjliggör riktad och skonsam rengöring, särskilt i mindre eller svåråtkomliga områden. Debrisoft Lolly är avsedd för engångsbruk och ska kasseras efter användning.



Filmförband

3M Tegaderm HP

Transparent filmförband är ett genomsläppligt, formbart förband med flexibilitet och stark fästförmåga – även i fuktiga miljöer.

Storlek; Finns i flera storlekar. Bra storlek 10x12cm

Leverantör; 3M



Tegaderm Sårfilm

Kan användas för att täcka och skydda kateterinfarter och sår, fixera anordningar vid huden.

Storlek; finns i flera olika storlekar. Bra storlek 10x12cm

Leverantör; 3M

**Opsite Flexifix**

Fixering av primära förband och lågt vidhäftande förband.

Storlek; 5cmx10m, 10cmx10m

Leverantör; Smith and Nephew

**Filmförband med absorption**

Upphandling pågår

Mepitel film

Ett mjukt, transparent och andningsbart hudskyddsförband som skyddar huden. Det kan användas separat eller tillsammans med andra produkter. Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte.

Storlek; finns i flera storlekar

Leverantör; Mölnlycke



Tejp

Suturtejp

Storlek; Finns i flera olika storlekar.

Leverantör; Medioplast



Tubbandage

Tubbandage Danafast DS

Används med fördel för att fixera förband. Bör användas som fixation på underben och tår för att inte orsaka tryck eller påverka cirkulationen i vid nedsatt arteriell cirkulation.

Storlek; Finns i flera storlekar och färgmarkering indikerar storlek,

Leverantör; Mediplast



Kompression

Coban 2 och Coban 2 lite

Kompressionssystem med 2 lager som kan sitta upp till 7 dagar. Patienter med normalt ankelindex från 0.9-1.3 kan använda Coban 2 (lila förpackning). Patienter med Ankelindex 0.6-0.8 kan använda Coban lite (grön förpackning). Kompressionstryck och val av produkt ska göras av läkare.

ALL KOMPRESSIONSBEHANDLING SKA ALLTID FÖREGÅS AV ANKELINDEX.

Storlek; 10cm.

Leverantör; 3M



