

## Leveransproblem med FC-Mix-rör (rosa kork) till P-Glukos från Hettich.

Pga att Hettiche inte ingått avtal med Region Kronoberg med FC-Mix-rör till P-Glukos får vi just nu inga FC-Mix-rör (rosa kork) till P-Glukos.

Under tiden ersätts röret med BD Vacutainer glukosrör (Natriumfluorid/Kaliumoxalat) 5/4 mL med grå kork. När FC-Mix-rören återigen finns hos leverantören kommer denna möjlighet att upphöra.

### Ersättningsrör;



### Observera:

**Provhantering ersättningsrör:** Efter provtagning blandas röret noga. Röret skickas så att det ankommer till lab inom 24 timmar. Vid provtagning sen eftermiddag centrifugeras röret i 10 min vid 2000g i rumstemperatur. Avskilj plasma till nytt plaströr. Förvaras i kylskåp 4-8° innan transport.

Vi ber er att vara uppmärksamma på att glukosnivån kan bli något lägre vid användning av rör med Natriumfluorid/Kaliumoxalat (grå kork). Samma referensvärde gäller för båda rörtyperna.

Bortse från information om rosa korkfärg på etikett från Cambio Cosmic och Remiss kemi.

Jenny Sonnerby  
Upphandlingsenheten

Marie Petersson  
PNA-Samordnare  
Kliniska kemiska laboratoriet