

ANVÄNDARSTÖD BILDREMISS UPLOAD & STORE

RGS IT VIS utb och support
REGION KRONOBERG

RGS-IT

Användarstöd Bildremiss
Upload & Store24-02-12
VIS-supporten

Användarstöd Bildremiss

Innehåll

Support.....	2
Upload & Store	3
Autentisering Upload and Store	3
Omautentisering	5
Byta PIN-kod.....	5
Glömd PIN-kod	6
Samla in media.....	8
Redigera Foto.....	12
Radera insamlad media.....	13
Logga ut.....	14

Support

IT-support

Supportar:

- Funktionskonto mobilen
- Uppkoppling emot regionens nät RGK 1
- Vid problem eller fel på bildremissenheten

Felanmälan via IT portalen eller ring, tel. 0470-582020 knappval 1.

VIS-support

Supportar:

- Cosmic

Felanmälan via IT portalen eller ring, tel. 0470-582020 knappval 2.

MT- Medicinteknik

Supportar:

- Vid problem eller fel med Dermatoskopet tel. 0470-587620.

Röntgen – RIS/PACS support

Supportar:

- Makulera en undersökning - Ska makuleras i Cosmic
- Funktioner eller fel i Uniview
- Fel i Upload & Store

Kontakt sker med Röntgen – RIS/PACS support, tel. 0470-587499

Upload & Store

Autentisering Upload and Store

Innan en användare loggar in i Upload & Store för första gången krävs en autentisering. Denna autentisering är sedan giltig i 180 dagar (6 månader). När autentiseringen är utgången görs en ny autentisering på samma sätt enligt instruktionen nedan.

För att kunna autentisera sig behövs ett Medarbetaruppdrag- Vård och behandling på enheten.

1. Logga in i Cosmic
2. Via Meny - Externa applikationer välj **SECTRA QR KOD**

Autentisering för Upload & Store App


Koppla ihop telefonen och inloggnings-ID med Sectra PACS




Skanna koden till höger med Sectra Upload & Store App på din enhet.



3. Webbbläsare öppnas och möjlighet finns nu att Autentisera dig emot appen Upload & Store
- A:** Om autentiseringen inte slutförs inom 3 min släpper ”kopplingen till Cosmic”, QR koden försvinner och ändras till att skriva in användarnamn och lösenord (samma som till datorn) för att åter få upp QR-koden
- B:** Första gången Sectra öppnas för dig som användare och QR koden inte blir synlig. Stäng ned webbläsaren.
Gå då via:
1. Cosmic Meny
 2. Beställning och Svar
 3. Bildarkiv Röntgen/Klinfys– detta för att få kicka igång ditt Medarbetaruppdrag
 4. Öppna därefter åter Via Meny - Externa applikationer välj **SECTRA QR KOD**

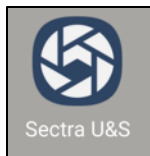

4. Öppna appen **Sectra U&S** i din mediainsamlingsenhet

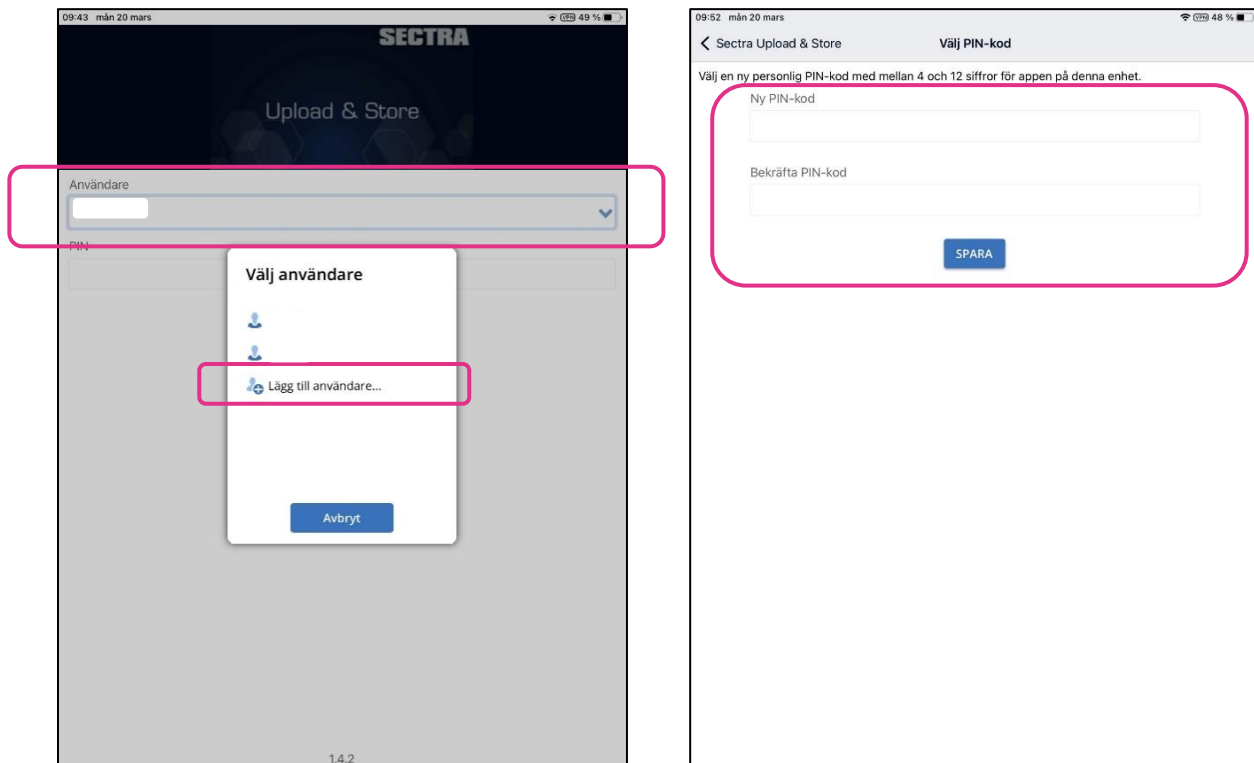

1. Klicka på rullisten **Användare**

2. **Lägg till användare**

3. Skanna QR koden som finns på autentiseringssidan och jämför bekräftelsekoden som visas upp på båda enheterna.

4. Om bekräftelsekoderna stämmer klicka **Ja**

Om bekräftelsekoderna inte stämmer på dina enheter klicka **Nej** och en ny QR-kod genereras.

5. Ange PIN-kod 4-12 siffror och bekräfta.


6. ” **SPARA** ”

7. **Nu är kan du använda appen Upload and Store.**


Omautentisering

Autentiseringen är giltig i 180 dagar (6 mån) därefter måste en ny autentisering utföras – följ manual [Autentisering Upload and Store](#)

Byta PIN-kod

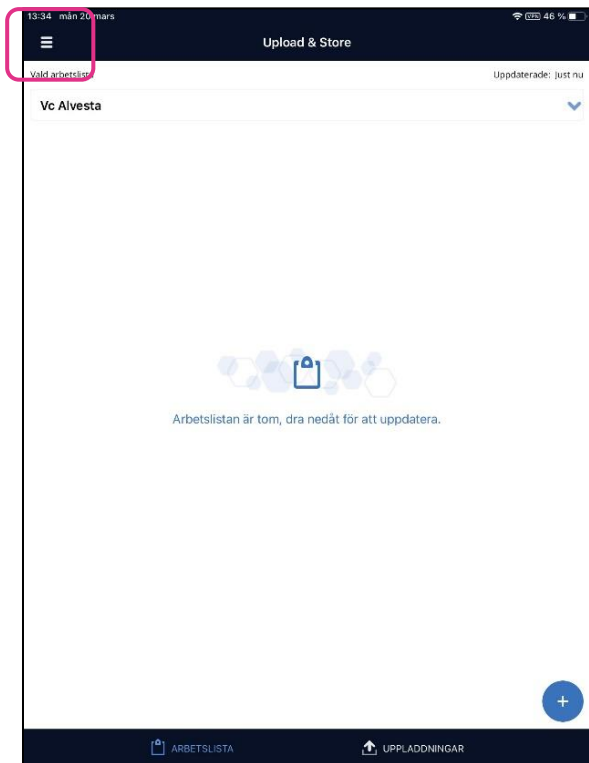

1. Öppna **Menyn** i appen Upload & Store

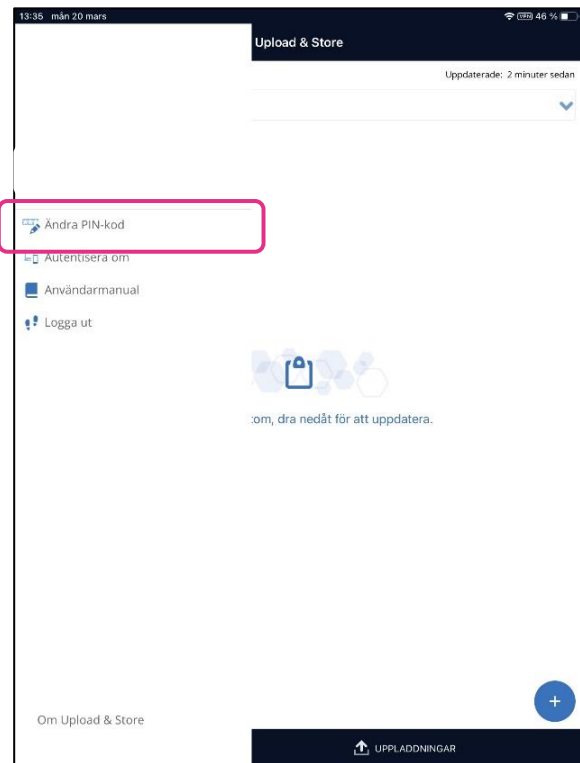

2. "**Ändra PIN-kod**" PIN-koden måste bestå av 4 till 12 siffror.

Glömd PIN-kod

För en användare som har glömt sin PIN-kod är det även möjligt att logga in och byta PIN - kod genom att skanna QR-koden igen.

1. Logga in i Cosmic
2. Via Meny - Externa applikationer välj **SECTRA QR KOD**
Autentisering för Upload & Store App


Koppla ihop telefonen och inloggnings-ID med
Sectra PACS




Skanna koden till höger med Sectra
Upload & Store App på din enhet.



3. Webbläsaren öppnas och möjlighet finns nu att Autentisera dig emot appen Upload & Store
Om autentiseringen inte slutförs inom 3 min släpper ”kopplingen till Cosmic” QR koden
försvinner och ändras till att skriva in användarnamn och lösenord (samma som till datorn) för
att åter få upp QR-koden

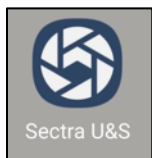


4. Öppna appen Sectra U&S i din mediainsamlingsenhet
5. Klicka på rullisten **Användare**
6. **Lägg till användare**
7. Skanna QR koden som finns på autentiseringssidan och jämför bekräftelsekoden som visas
upp på båda enheterna.
8. Om bekräftelsekoderna stämmer klicka ” **Ja** ”

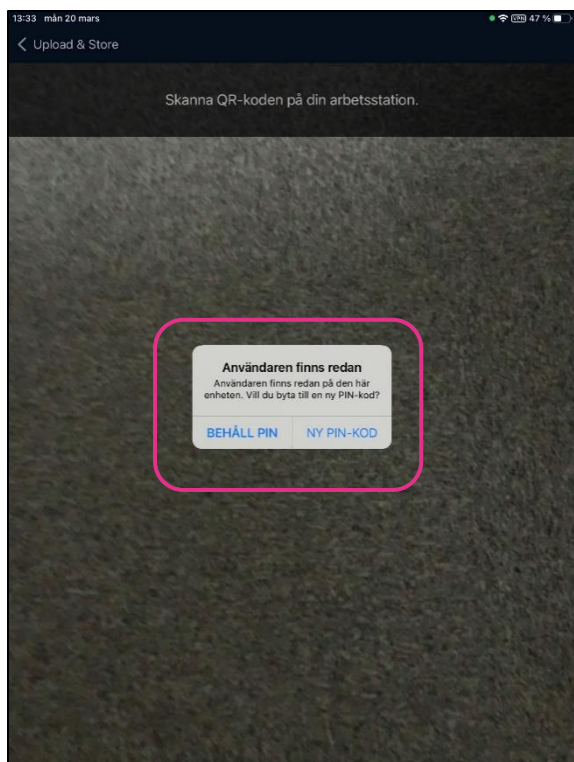

9. Ruta öppnas ”Användaren finns redan Användaren finns redan på den här enheten. Vill du byta PIN-kod? ”

10. Välj ” Ny PIN KOD ”


Samla in media

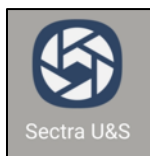

1. Logga in i appen Upload & Store i din mediainsamlingsenhet


Är appen öppen men inaktiv så blir man automatiskt utloggad efter 5 min

2. Välj **Användare** och skriv in PIN - Kod

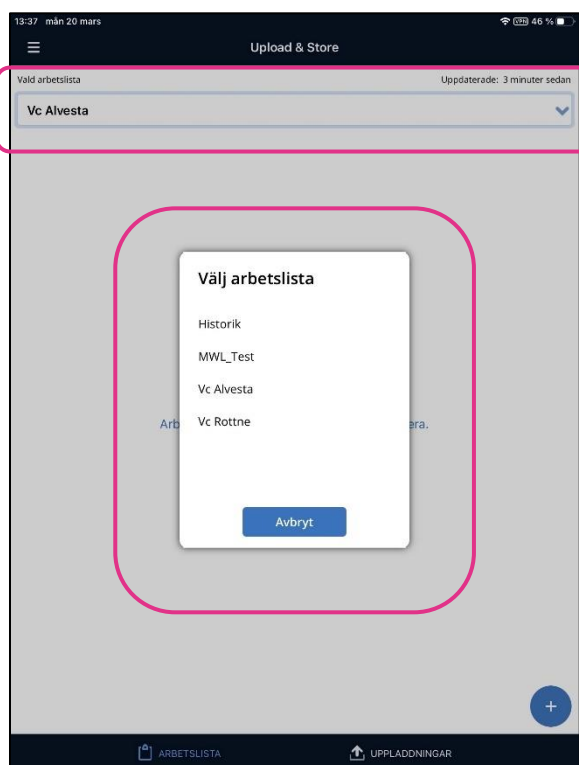


3. Välj aktuell **arbetslista** och dagens worklist blir synlig.


– För att patienten ska synas i dagens worklist behöver en mediaundersökning vara skapad i Cosmic – [Skapa ny mediaundersökning](#)

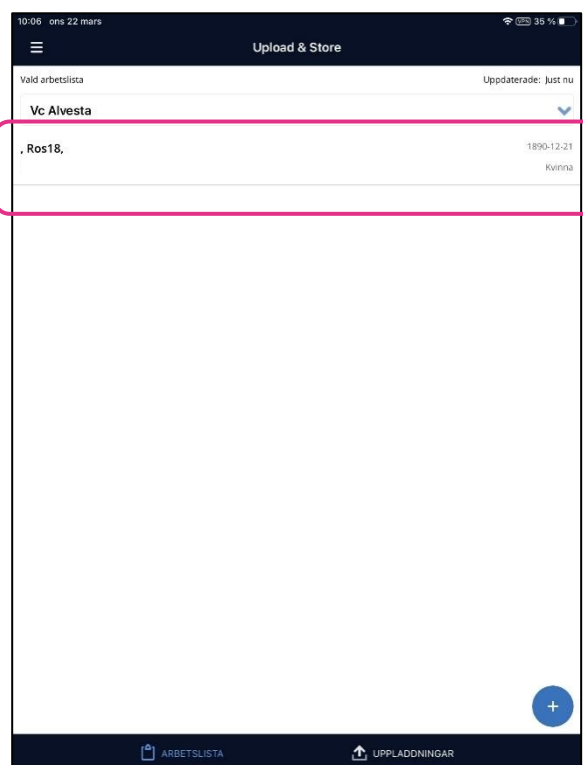

4. Klicka på aktuell patient ifrån arbetslistan och kontrollera att personnumret är korrekt.

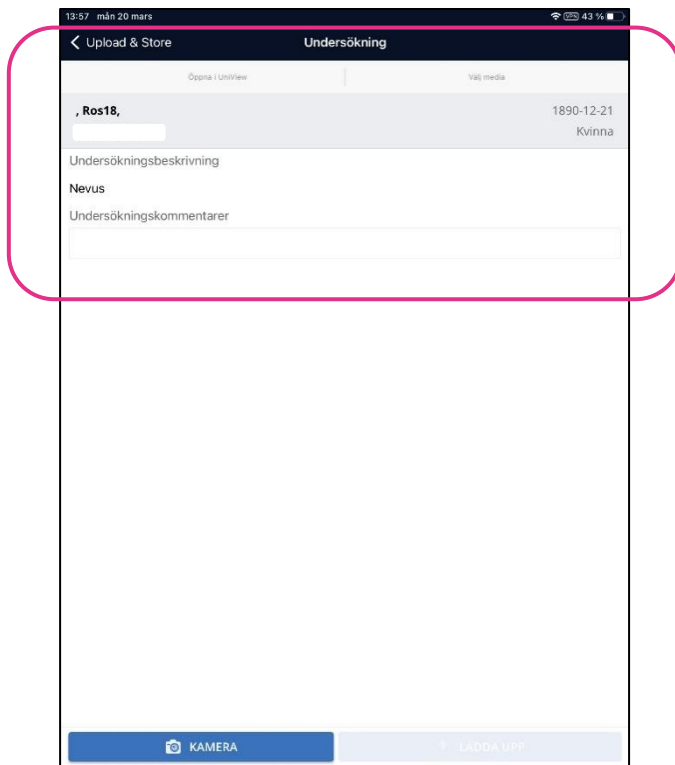

5. Undersökningsunderlag öppnas

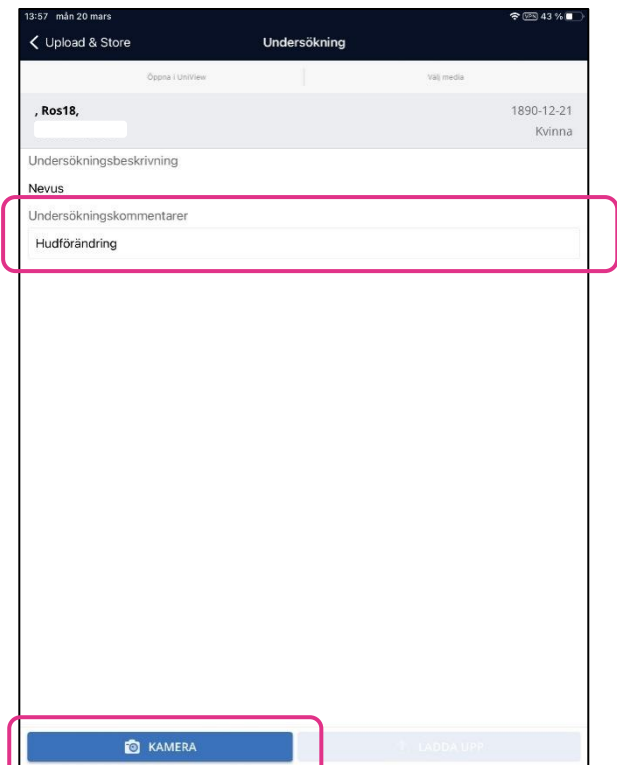

6. Skriv in undersökningskommentar om det önskas

7. Klicka på ” Kamera ”




8. Samla in media med att klicka på ” Foto ”

9. När foto är taget syns den insamlade median i en liten ruta nere till vänster – där står även antalet bilder som är insamlade




10. Det går att klicka i kameravyn för att ställa in fokus samt zooma med två fingrar drar in el ut beroende på zoomning.

11. När insamlingen är färdig - Pila tillbaka längst upp till vänster eller klicka på bilden nere till höger

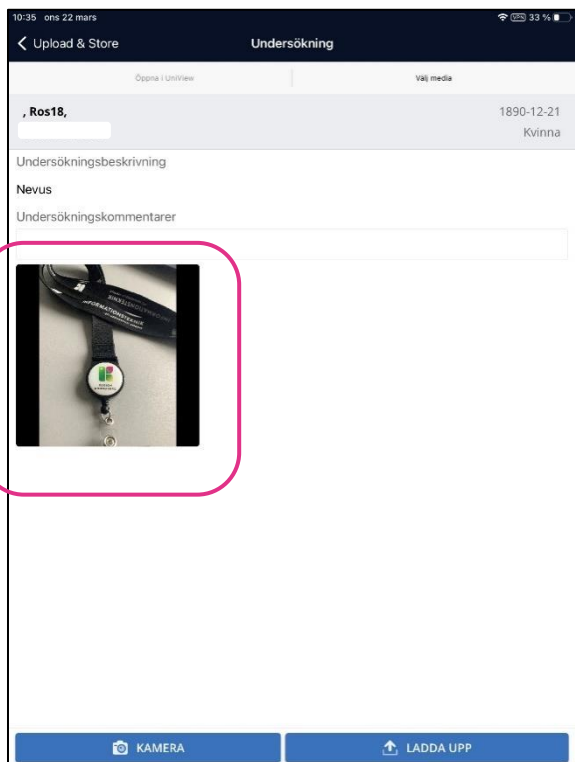


12. Det går att lägga till vilken **Kroppsdel** samt **Sida** på varje insamlad media

13. Klicka på bilden

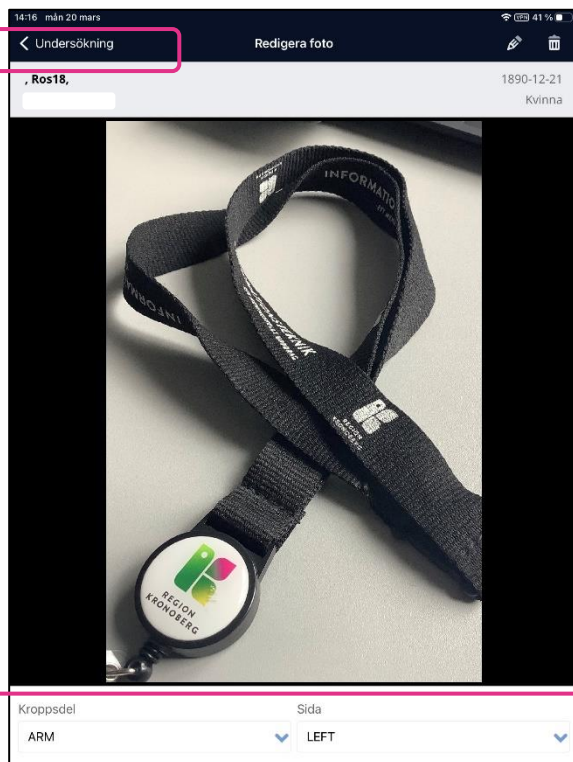


14. Välj **Kroppsdel** och **Sida** i respektive rullist.


15. Pila tillbaka längst upp till vänster till undersökningen

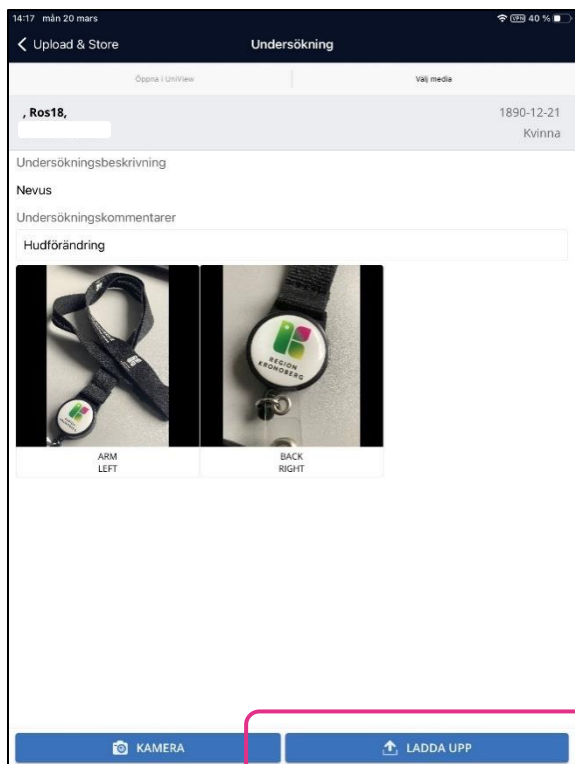


16. Kontrollera bildernas kvalitet, radera media som inte ska laddas upp och klicka på ”**Ladda upp**”

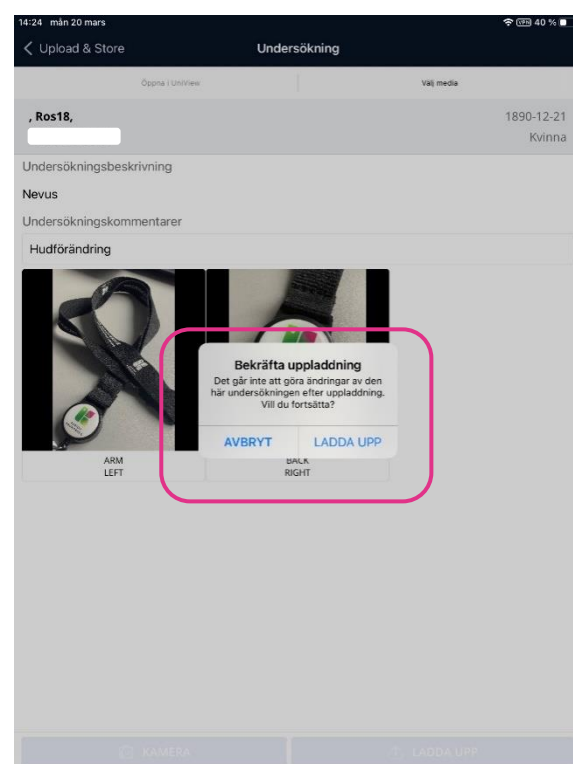

17. Bekräfta uppladdning ”**Ladda upp**”

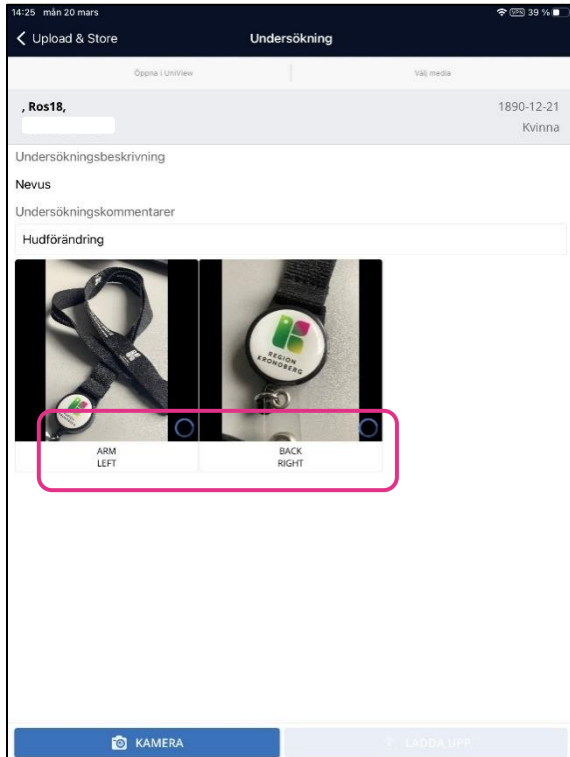

18. Håll appen Upload & Store öppen medans uppladdningen sker.

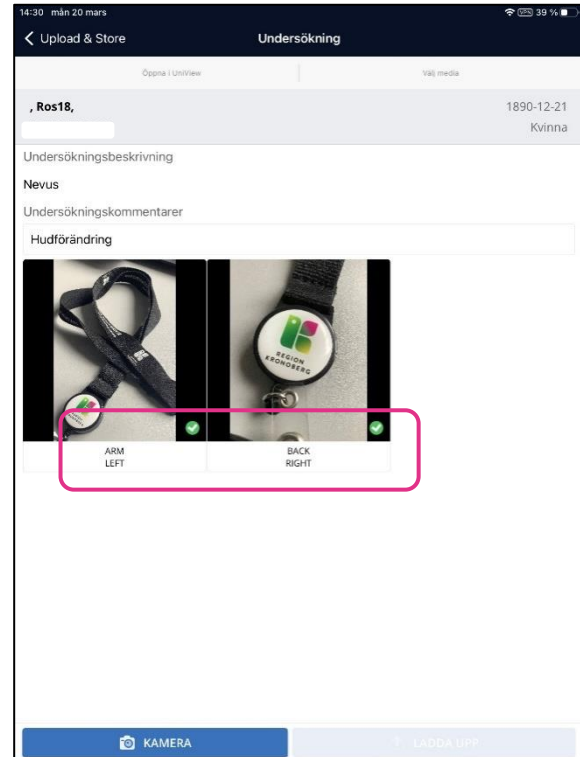

19. När median är överförd visas **gröna bockar** i median – I mediaundersökningen i Cosmic är statuset nu **Media finns**

I vyn **Uppladdningar** ligger det uppladdade underlaget och median kvar i 2 h – det går härifrån att samla in mer media och ladda upp.


Efter 2 timmar flyttas underlagt ifrån **Uppladdningar** till **Historik** och töms på median. Underlaget ligger kvar i 30 dagar och under denna tiden går det att lägga till mer media.

Redigera Foto


Det går att utföra viss redigering direkt i appen Upload & Store:

- Skärmsklipp
- Roterar foto

Detta utförs innan fotot laddas upp.

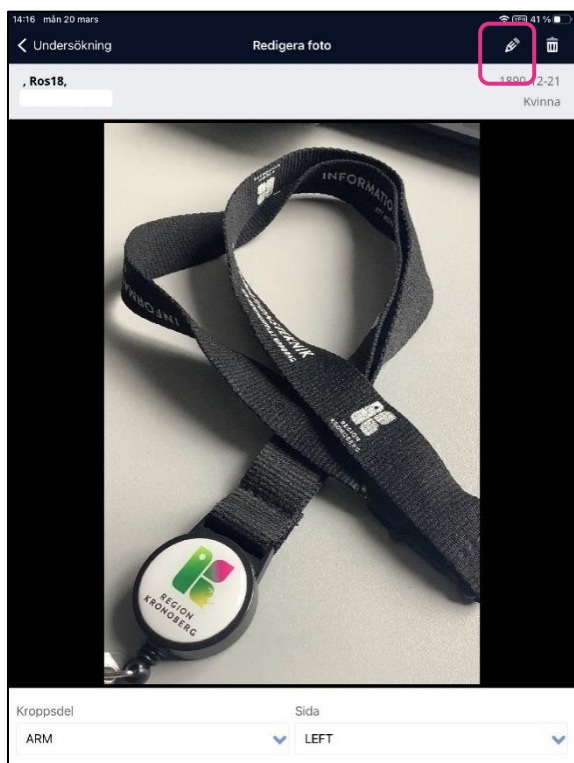

1. Klicka på median ifrån undersökningsunderlaget
2. Klicka på **pennan**

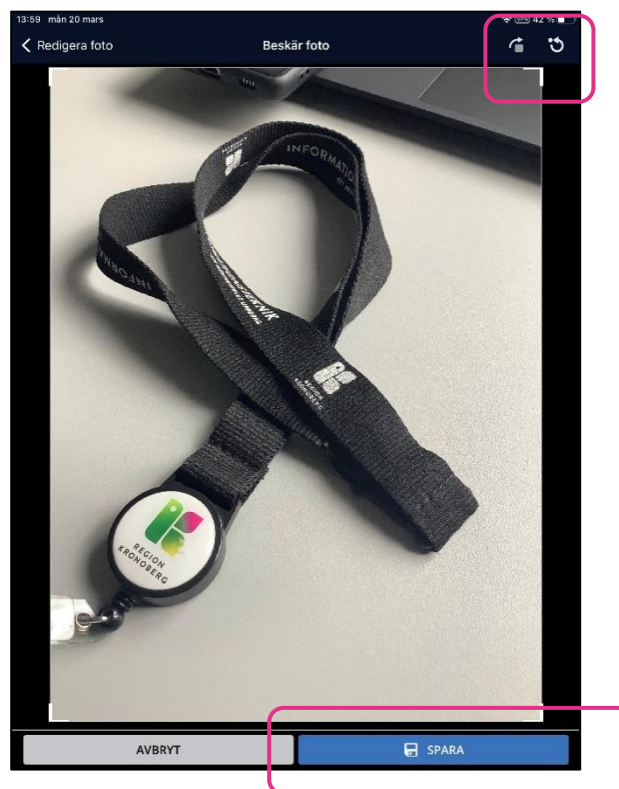

3. Median kan nu **Beskäras** och/eller **Roterar**.

Det går även att ångra ändringen innan den sparas




4. ” **Spara** ” för att spara de utförda ändringarna

Radera insamlad media

Det går att radera insamlad media innan den överförs /laddas upp på 2 olika sätt.

1.

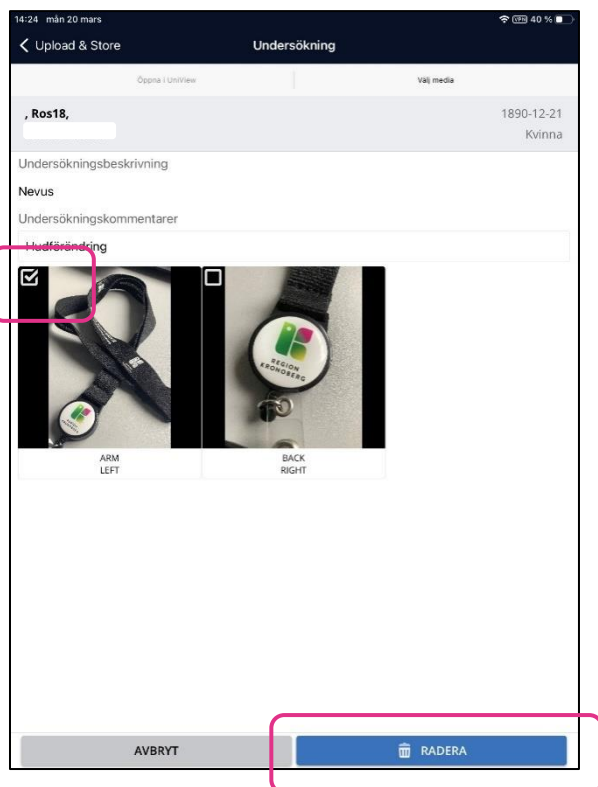


1:1. Radera ifrån Undersökningsunderlaget med att klicka på median.

2. Median blir markerad med en bock och radera knappen blir aktiv

3. ” Radera ”

4. Bekräfta radering – ” Radera”


2.

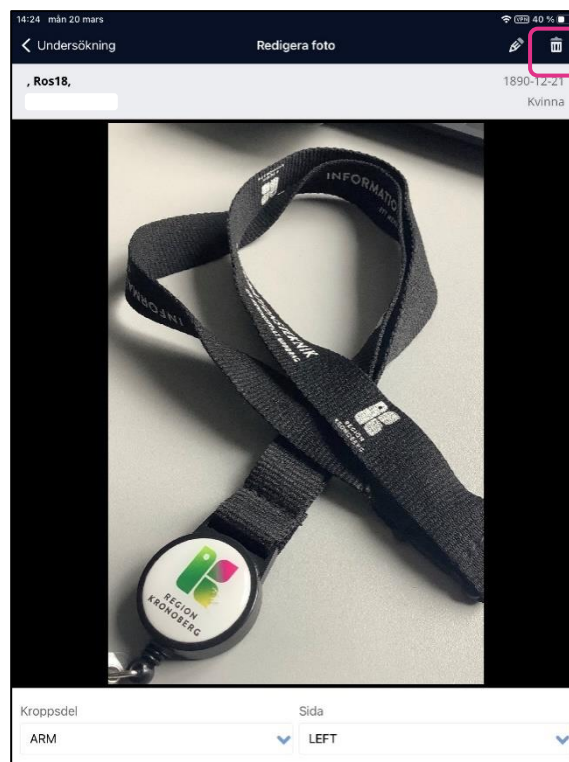


2:1. Öppna upp median och klicka på papperskorgen uppe i högra hörnet.

2. Bekräfta radering – ” Radera”

Logga ut

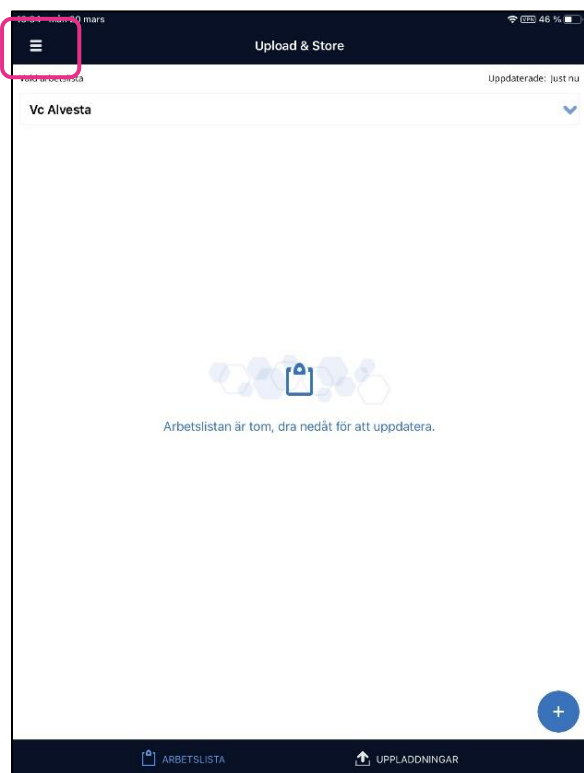

2. Öppna Menyn i appen Upload & Store

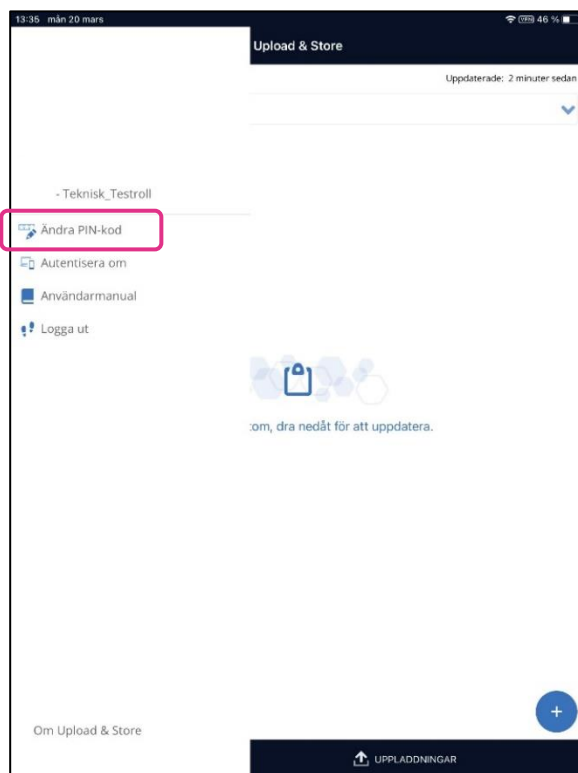

2. "Ändra PIN-kod " PIN-koden måste bestå av 4 till 12 siffror.