

ANVÄNDARSTÖD UPLOAD & STORE

RGS IT VIS utb och support
REGION KRONOBERG

RGS-IT

Användarstöd
Upload & Store24-02-12
Uppdaterad 26-04-23
VIS-supporten

Användarstöd Upload & Store

Innehåll

Support	2
Upload & Store	3
Autentisering Upload and Store	3
Omautentisering	5
Byta PIN-kod	5
Glömd PIN-kod	6
Samla in media	8
Redigera Foto.....	12
Radera insamlad media.....	13
Logga ut	14

Support

IT-support

Supportar:

- Funktionskonto mobilen
- Uppkoppling emot regionens nät RGK 1
- Vid problem eller fel på bildremissenheten

Felanmälan via IT portalen eller ring, tel. 0470-582020 knappval 1.

VIS-support

Supportar:

- Cosmic
- Makulera en undersökning - Ska makuleras i Cosmic
- Funktioner eller fel i Uniview
- Fel i Upload & Store

Felanmälan via IT portalen eller ring, tel. 0470-582020 knappval 2.

MT- Medicinteknik

Supportar:

- Vid problem eller fel med Dermatoskopet eller utrustning tel. 0470-587620.

Upload & Store

Autentisering Upload and Store

Innan en användare loggar in i Upload & Store för första gången krävs en autentisering. Denna autentisering är sedan giltig i 180 dagar (6 månader). När autentiseringen är utgången görs en ny autentisering på samma sätt enligt instruktionen nedan.

För att kunna autentisera sig behövs ett Medarbetaruppdrag- Vård och behandling på enheten.

1. Logga in i Cosmic
2. Via Meny - Externa applikationer välj **SECTRA QR KOD**

Autentisering för Upload & Store App


Koppla ihop telefonen och inloggnings-ID med Sectra PACS




Skanna koden till höger med Sectra Upload & Store App på din enhet.



3. Webbläsare öppnas och möjlighet finns nu att Autentisera dig emot appen Upload & Store
 - A:** Om autentiseringen inte slutförs inom 3 min släpper **kopplingen till Cosmic**, QR koden försvinner och ändras till att skriva in användarnamn och lösenord (samma som till datorn) för att åter få upp QR-koden
 - B:** Första gången Sectra öppnas för dig som användare och QR koden inte blir synlig. Stäng ned webbläsaren.
Gå då via:
 1. Cosmic Meny
 2. Beställning och Svar
 3. Bildarkiv Röntgen/Klinfys– detta för att få kicka igång ditt Medarbetaruppdrag
 4. Öppna därefter åter Via Meny - Externa applikationer välj **SECTRA QR KOD**

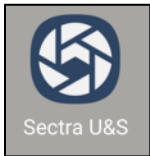


4. Öppna appen **Sectra U&S** i din mediainsamlingsenhet

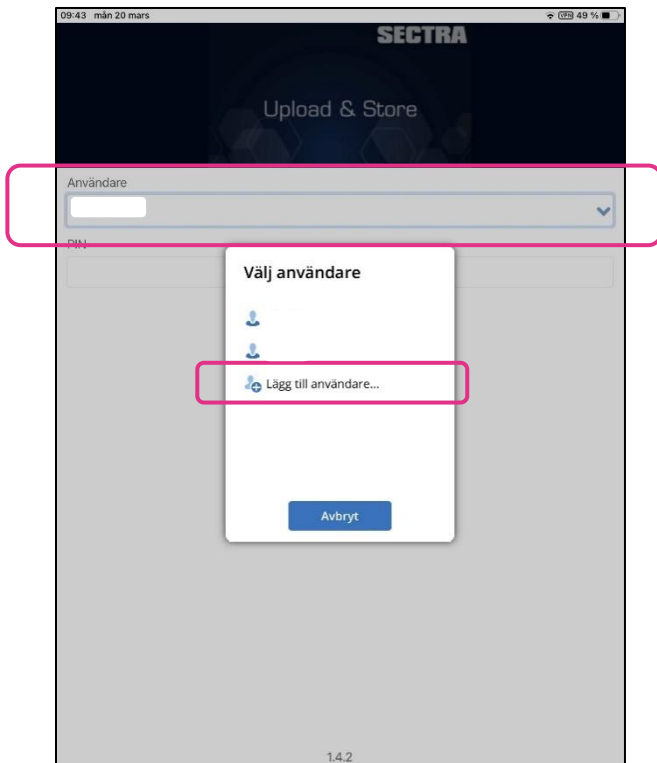

1. Klicka på rullisten **Användare**
2. **Lägg till användare**
3. Skanna QR koden som finns på autentiseringssidan och jämför bekräftelsekoden som visas upp på båda enheterna.
4. Om bekräftelsekoderna stämmer klicka **Ja**

Om bekräftelsekoderna inte stämmer på dina enheter klicka **Nej** och en ny QR-kod genereras.

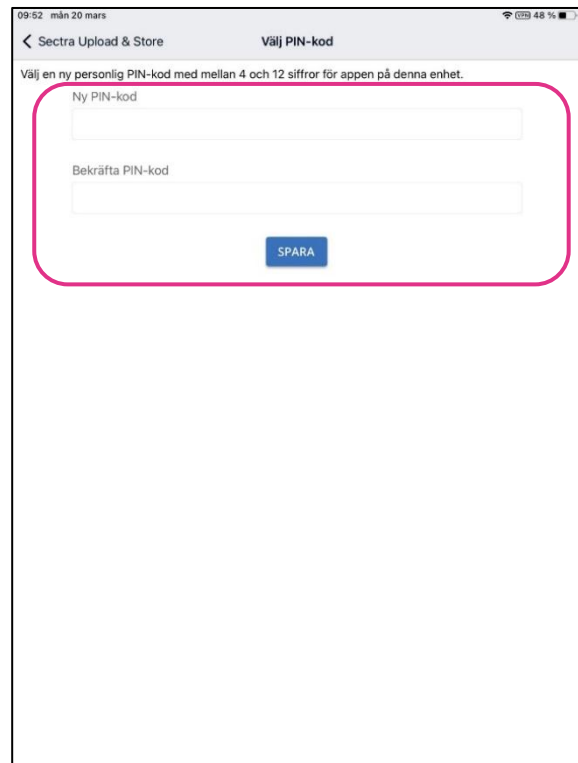


5. Ange PIN-kod 4-12 siffror och bekräfta.
6. **SPARA**
7. Nu är kan du använda **appen Upload & Store**.


Omautentisering

Autentiseringen är giltig i 180 dagar (6 mån) därefter måste en ny autentisering utföras – följ manual [Autentisering Upload and Store](#)

Byta PIN-kod

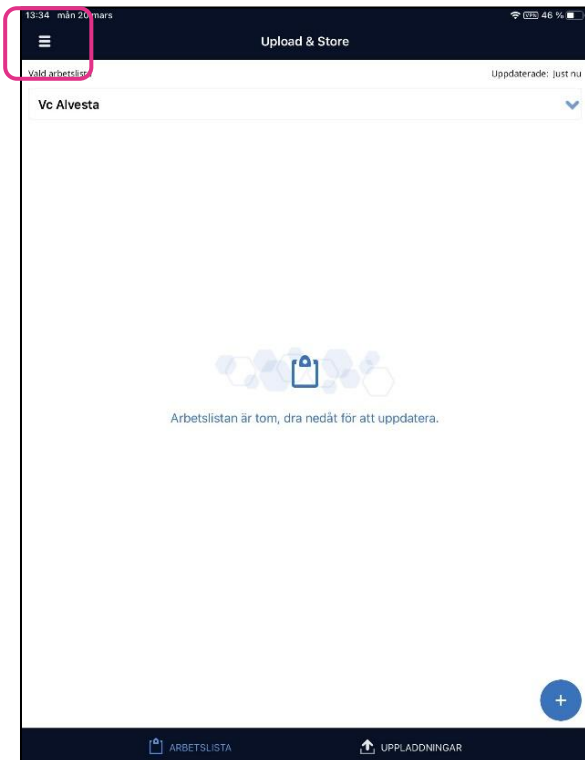

1. Öppna Menyn i appen Upload & Store

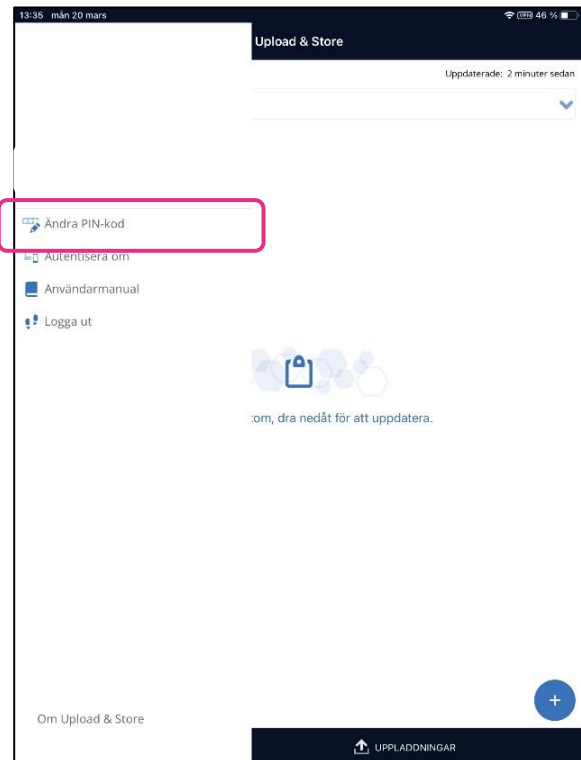

2. Ändra PIN-kod PIN-koden måste bestå av 4 till 12 siffror.

Glömd PIN-kod

För en användare som har glömt sin PIN-kod är det även möjligt att logga in och byta PIN - kod genom att skanna QR-koden igen.

1. Logga in i Cosmic
2. Via Meny - Externa applikationer välj **SECTRA QR KOD**
Autentisering för Upload & Store App


Koppla ihop telefonen och inloggnings-ID med
Sectra PACS




Skanna koden till höger med Sectra
Upload & Store App på din enhet.



3. Webbläsaren öppnas och möjlighet finns nu att Autentisera dig emot appen Upload & Store
Om autentiseringen inte slutförs inom 3 min släpper **kopplingen till Cosmic** QR koden försvinner och ändras till att skriva in användarnamn och lösenord (samma som till datorn) för att åter få upp QR-koden

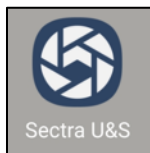


4. Öppna appen Sectra U&S i din mediainsamlingsenhet
5. Klicka på rullisten **Användare**
6. **Lägg till användare**
7. Skanna QR koden som finns på autentiseringssidan och jämför bekräftelsekoden som visas upp på båda enheterna.
8. Om bekräftelsekoderna stämmer klicka **Ja**


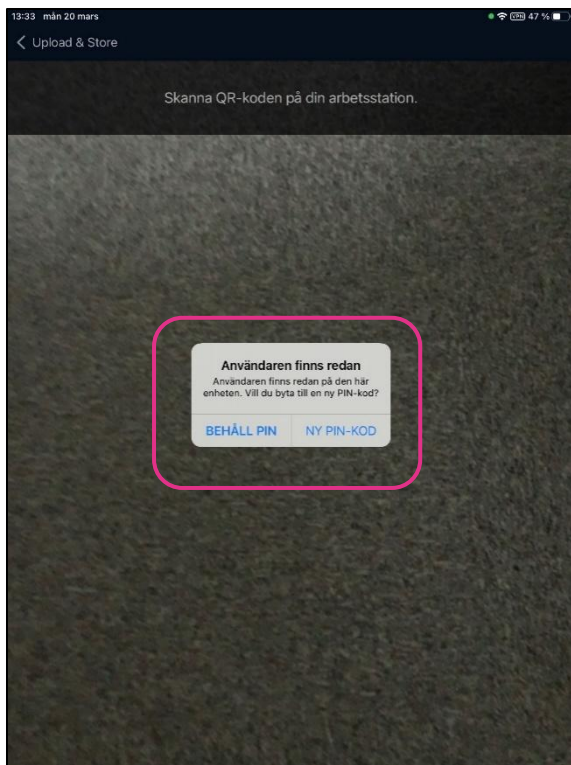


9. Ruta öppnas Användaren finns redan Användaren finns redan på den här enheten. Vill du byta PIN-kod? - Välj **NY PIN KOD**

Samla in media

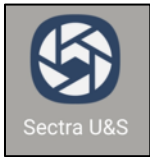


1. Logga in i appen Upload & Store i din mediainsamlingsenhet. Är appen öppen men inaktiv så blir man automatiskt utloggad efter 5 min
2. Välj **Användare** och skriv in PIN - Kod

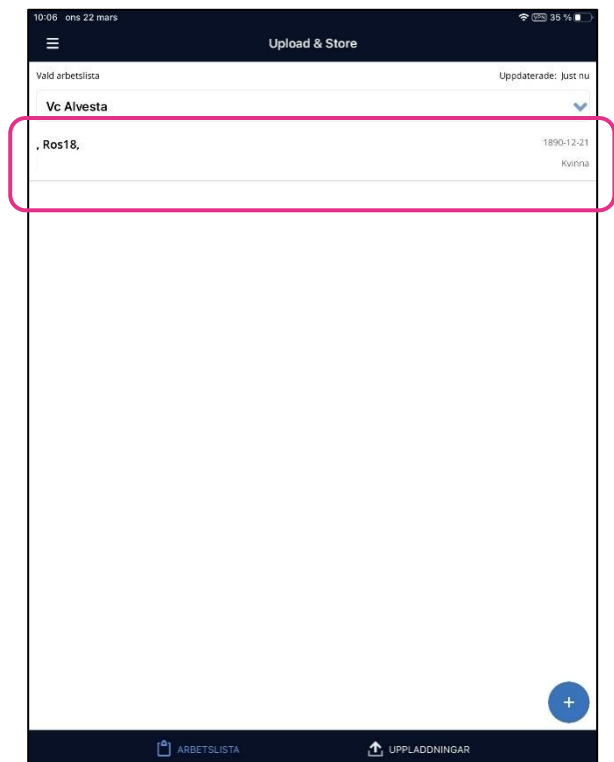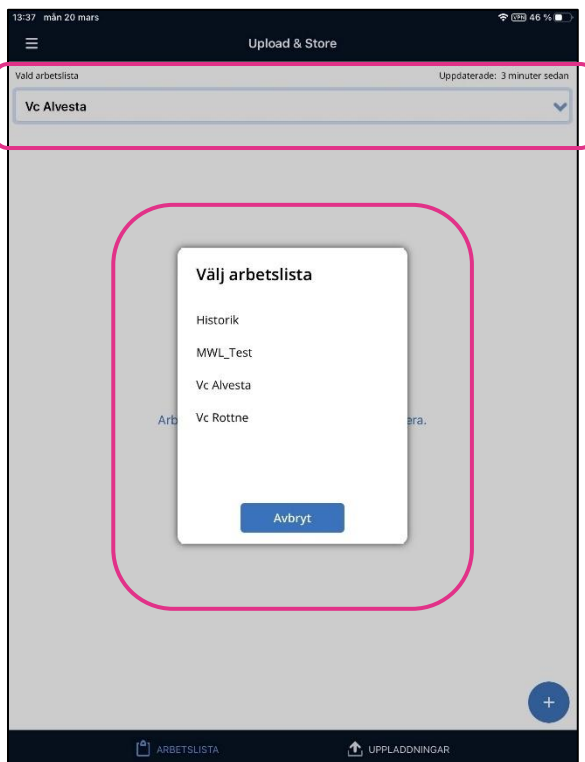


3. Välj aktuell **arbetslista** och dagens mediaundersökningar blir synliga

– För att patienten ska synas i dagens arbetslista behöver en mediaundersökning vara skapad i Cosmic – [Skapa ny mediaundersökning](#)

4. Klicka på aktuell patient ifrån arbetslistan och kontrollera att personnumret är korrekt

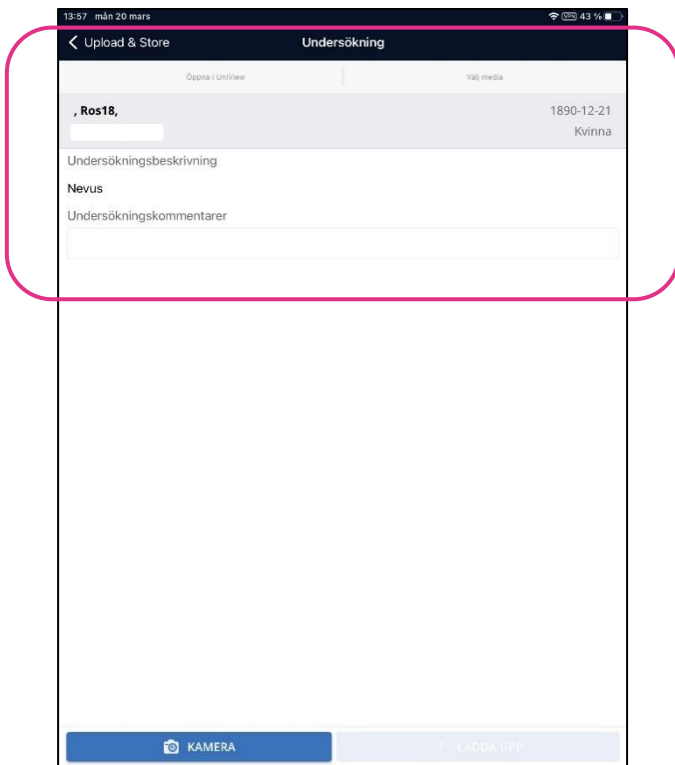

5. Undersökningsunderlag öppnas

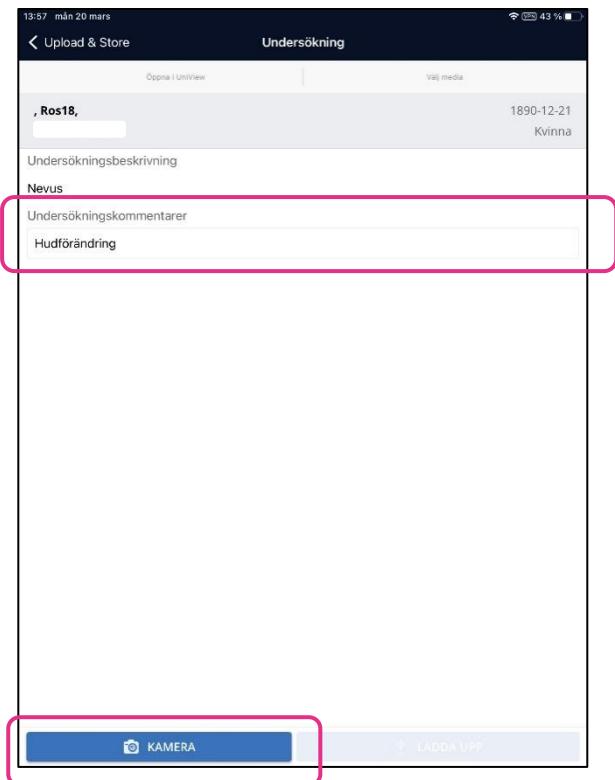


6. Skriv in undersökningskommentar om det önskas

7. Klicka på Kamera




8. Samla in media med att klicka på **Foto**

9. När foto är taget syns den insamlade median i en liten ruta nere till vänster – där står även antalet bilder som är insamlade

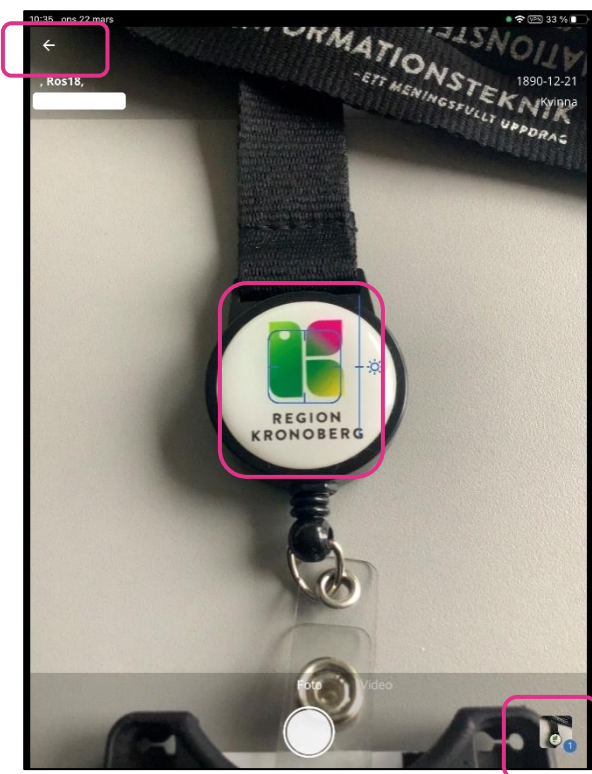


10. Det går att klicka i kameravyn för att ställa in fokus samt zooma med två fingrar drar in el ut beroende på zoomning.

11. När insamlingen är färdig - Pila tillbaka längst upp till vänster eller klicka på bilden nere till höger

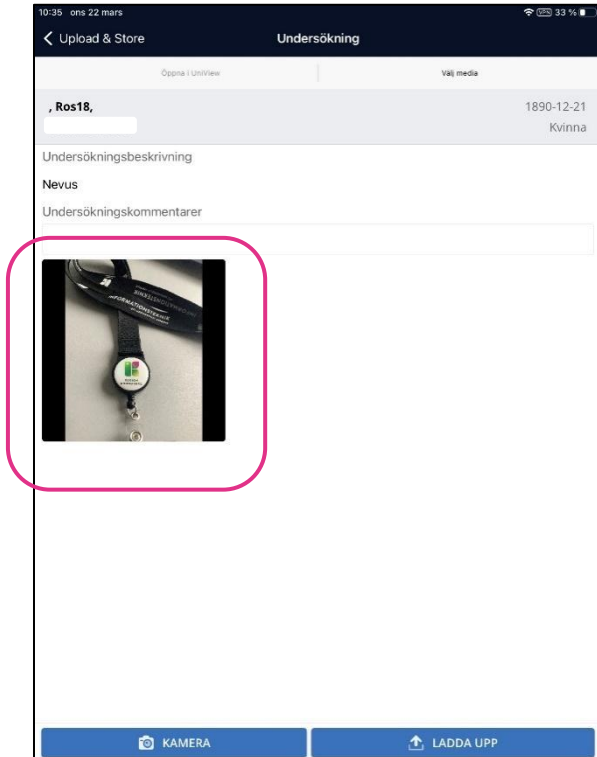


12. Det går att lägga till vilken **Kroppsdel** samt **Sida** på varje insamlad media

13. Klicka på bilden

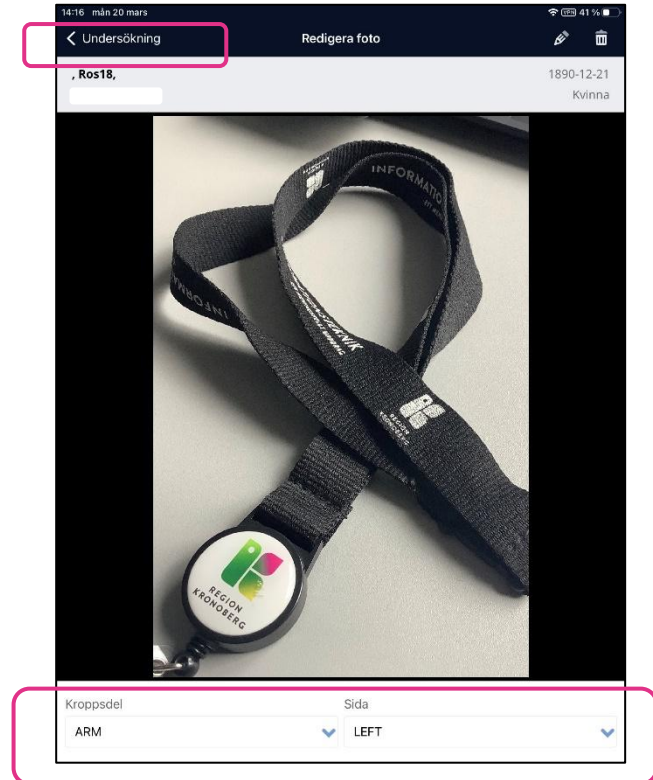


14. Välj **Kroppsdel** och **Sida** i respektive rullist.


15. **Pila** tillbaka längst upp till vänster till undersökningen

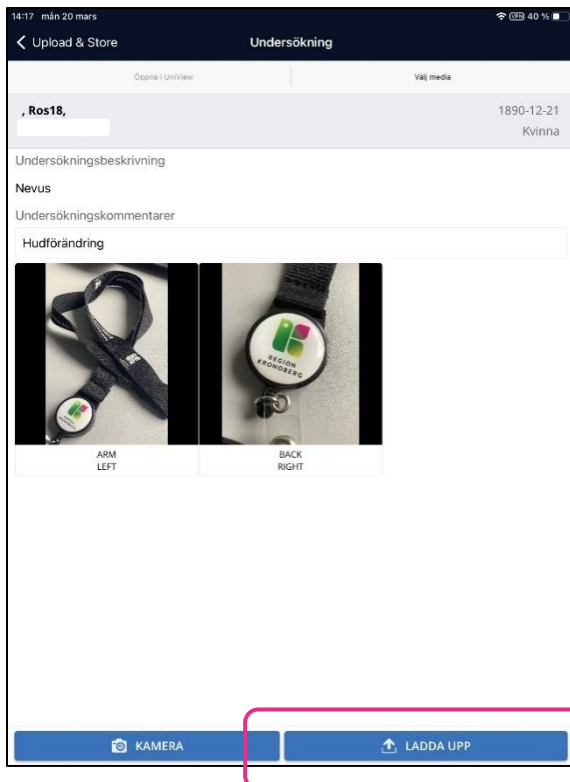


16. Kontrollera bildernas kvalitet, radera media som inte ska laddas upp och klicka på **Ladda upp**

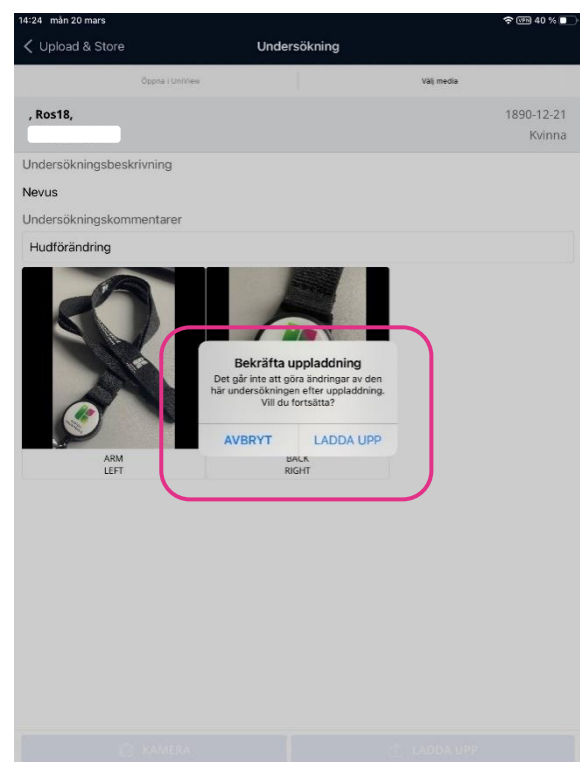

17. Bekräfta uppladdning **Ladda upp**

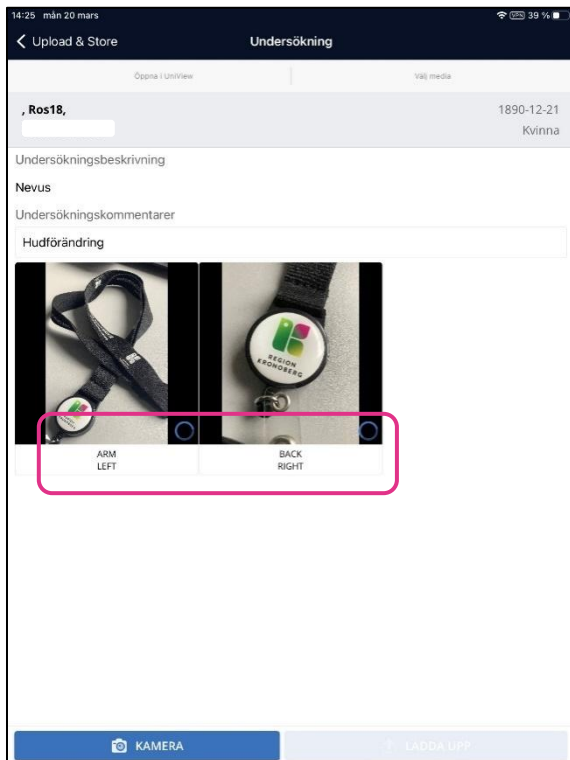

18. Håll appen Upload & Store öppen medans uppladdningen sker.

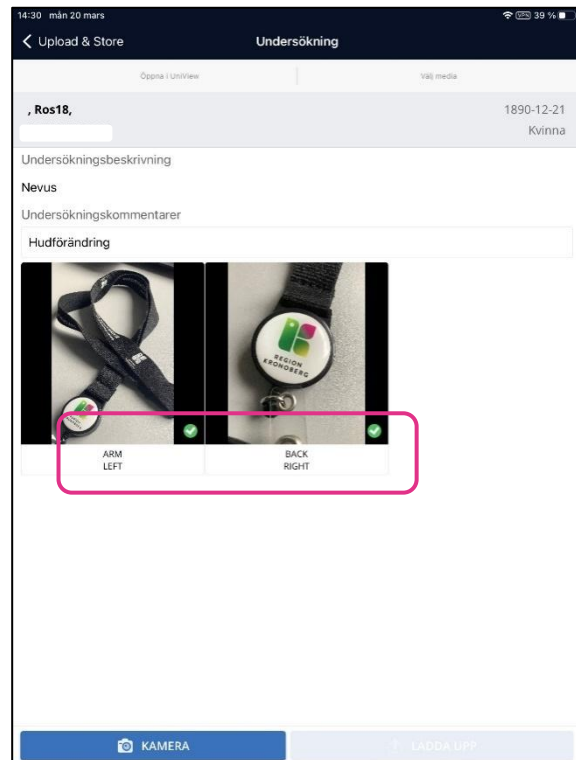

19. När median är överförd visas **gröna bockar** i median – I mediaundersökningen i Cosmic är statuset nu **Media finns**

I vyn **Uppladdningar** ligger det uppladdade underlaget och median kvar i 2 h – det går härifrån att samla in mer media och ladda upp.


Efter 2 timmar flyttas underlaget ifrån **Uppladdningar** till **Historik** och töms på median. Underlaget ligger kvar i 30 dagar och under denna tiden går det att lägga till mer media.

Redigera Foto


Det går att utföra viss redigering direkt i appen Upload & Store:

- Skärmsklipp
- Roterar foto

Detta utförs innan fotot laddas upp.

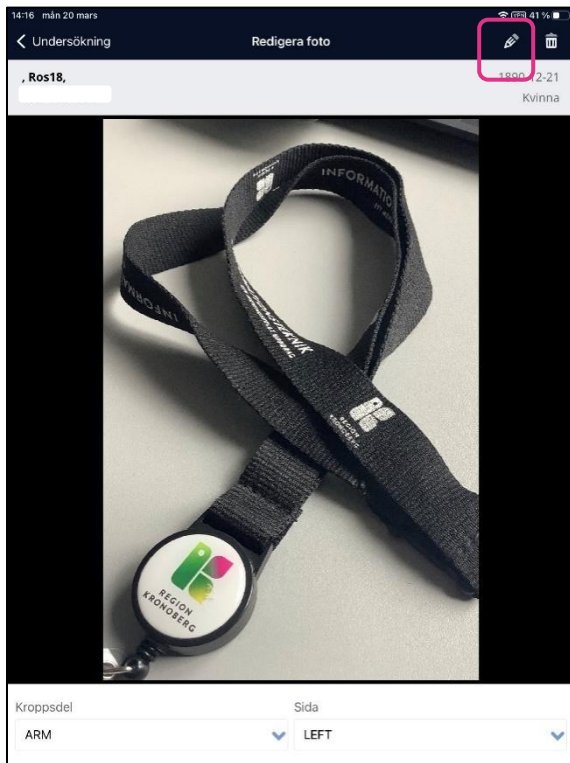

1. Klicka på median ifrån undersökningsunderlaget
2. Klicka på **pennan**

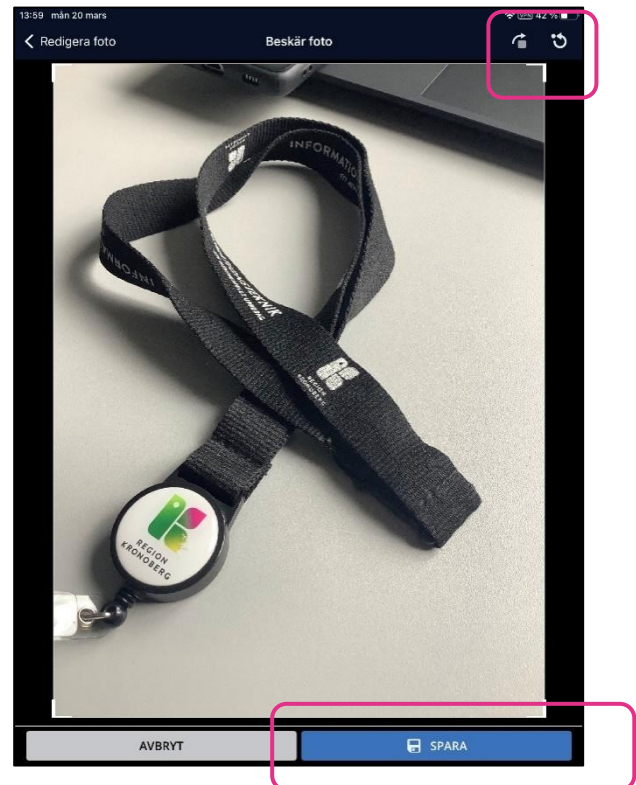

3. Median kan nu **Beskäras** och/eller **Roterar**.

Det går även att ångra ändringen innan den sparas




4. **Spara** för att spara de utförda ändringarna

Radera insamlad media

Det går att radera insamlad media innan den överförs /laddas upp på 2 olika sätt.

1.

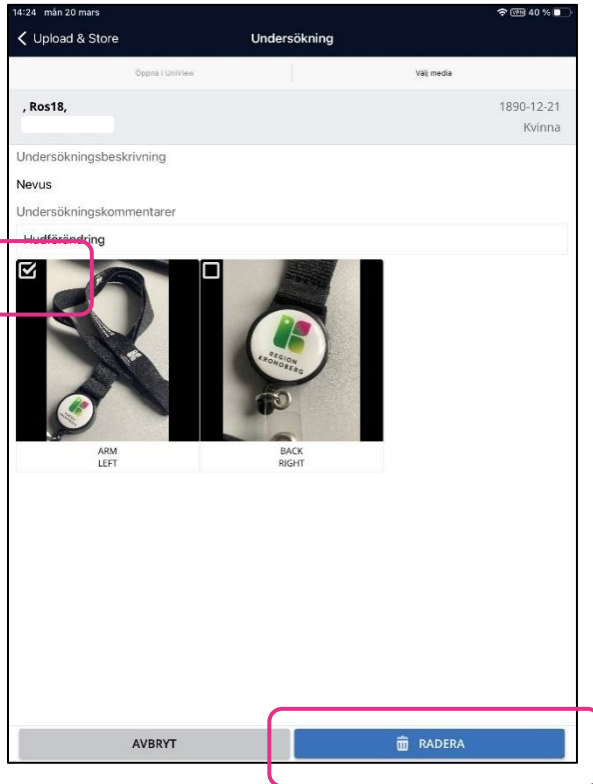


1A: Radera ifrån Undersökningsunderlaget med att klicka på median.

2. Median blir markerad med en bock och radera knappen blir aktiv

3. **Radera**

4. Bekräfta radering – **Radera**


2.

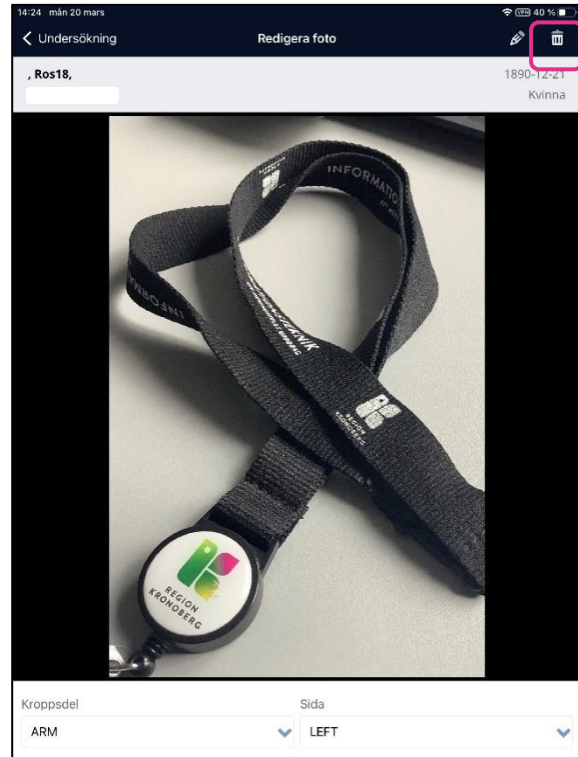


2B: Öppna upp median och klicka på papperskorgen uppe i högra hörnet.

2. Bekräfta radering – **Radera**

Logga ut

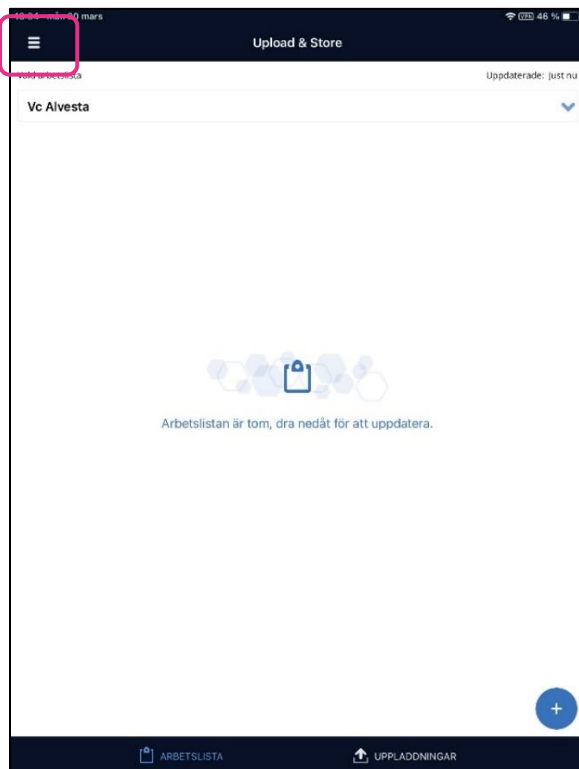

2. Öppna Menyn i appen Upload & Store

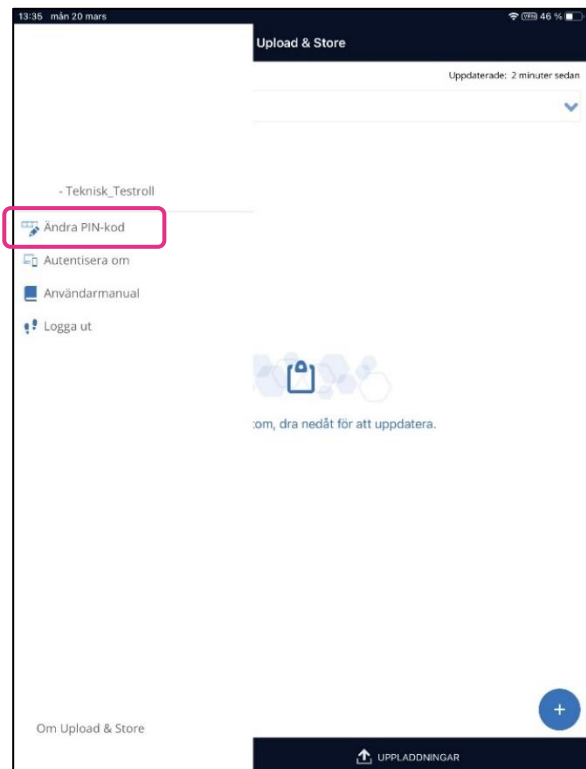

2. **Ändra PIN-kod** PIN-koden måste bestå av 4 till 12 siffror.