

## Vårdhygieniska rutiner för transport och förvaring av NPWT från Mediq

Med pumpen kommer en transportväska i plast som pumpen ligger i, samt en tygväska (patientväska). Transportväskans inredning är tillverkat i ett skumplastmaterial som inte kan rengöras på ett säkert sätt. Transportväskan kan därför inte skickas med patienten.

### Innan patient:

- Plocka ur pumpen ur transportväskan och lämna transportväskan på kirurgmottagningen/ortopedmottagningen (endast CLV), gäller både CLV och LL.
- Desinfektera pumpen, sladden och lägg på en ren yta tillsammans med övrigt material.
- Ta fram den nya patientväskan
- Förbered en kasse eller diskbar låda (som kan köras i diskdesinfektor) som patienten kan få med hem med tillbehör.
- Bruksanvisningen placeras i en plastficka.
- Patientbroschyren får varje patient, den sparas inte.

### Under behandling:

- Rengör pumpen med ytdesinfektion en gång/vecka. Förslagsvis i samband med byte av kanister.

### Efter behandling

- Kasta allt engångs/enpatientsmaterial i hushållssopor, även patientväskan (tygväskan).
- Se till att alla flergångsdelar inklusive bruksanvisning kommer tillbaka till ursprungskliniken.

### Innan pumpen packas i transportväskan:

- Rengör pump och sladd med engångs microfiberduk fuktad med vatten.
- Desinfektera med ytdesinfektionsmedel.
- Byt plastficka på bruksanvisningen.